



TS SYSTEM

Имплантат

- 024** Имплантат TSIII SA
- 026** Имплантат TSIII BA
- 028** Имплантат TSIV SA
- 030** Установочный Адаптер
- 030** Винт Заглушка
- 031** Формирователь Десны
- 032** Индивидуальный Форм-ль Десны

Компоненты

- 034** Процедура протезирования / Схема 1
- 035** Rigid Абатмент
- 041** Transfer Abutment
- 046** Процедура протезирования / Схема 2
- 047** Угловой Абатмент
- 050** FreeForm ST Абатмент
- 052** NP-Cast Abutment
- 054** Процедура протезирования / Схема 3
- 055** Temporary Абатмент (Quick)
- 058** Процедура протезирования / Схема 4
- 059** Locator Абатмент


Имплантат TSIII SA

- Имплантат погруженного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°
- Поверхность SA подвергается пескоструйной обработке оксидом алюминия и травлению кислотой
- Конусообразное тело имплантата обеспечивает высокую начальную стабильность
- Мелкая резьба: Увеличение начальной стабильности в мягкой костной ткани
- Штопорная резьба обеспечивает эффективное само нарезание

Имплантат Ультра-Широкий

- Используется при немедленной имплантации в лунку удаленного моляра и замене не прижившегося имплантата
- Оптимальная конструкция верхушки имплантата, которая позволяет получить устойчивое начальное крепление при установке даже на 3мм ниже лунки зуба
- Рекомендуемый вращающий момент при вкручивании: 40Нсм

※ Примечание: при реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром более 4.5мм

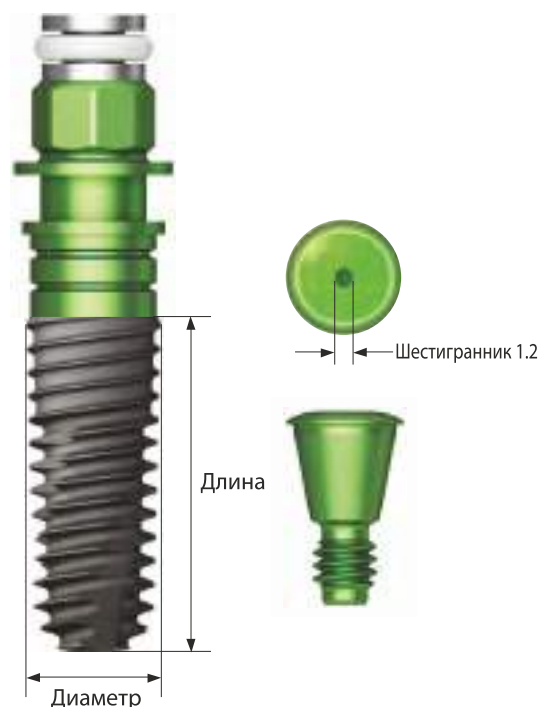

Имплантат без Установочного Адаптера

Код заказа : Код имплантата (Пример : TS3S4010S)

Имплантат с Установочным Адаптером

(Имплантат + Установочный Адаптер + Винт- заглушка)

Код заказа: **B** + Код имплантата (Пример : **B**TS3S4010S)

Ø3.0

Длина	8.5	10	11.5	13
Шестигранник 2.1				
	TS3M3008S	TS3M3010S	TS3M3011S	TS3M3013S



Ø3.5

Длина	8.5	10	11.5	13
Шестигранник 2.1				
	TS3M3508S	TS3M3510S	TS3M3511S	TS3M3513S



Ø4.0

Длина	7	7	8.5	10	11.5	13
Шестигранник 2.5						
	TS3S4006S	TS3S4007S	TS3S4008S	TS3S4010S	TS3S4011S	TS3S4013S



Экстра
Короткий

Ø4.5**Шестигранник 2.5**

Длина	7	7	8.5	10	11.5	13
						
	Экстра Короткий					
	TS3S 4506S	TS3S 4507S	TS3S 4508S	TS3S 4510S	TS3S 4511S	TS3S 4513S

Ø5.0**Шестигранник 2.5**

Длина	6	6	6	7	8.5	10	11.5	13
								
	Экстра Короткий	Экстра Короткий	Короткий					
	TS3S 5004S	TS3S 5005S	TS3S 5006S	TS3S 5007S	TS3S 5008S	TS3S 5010S	TS3S 5011S	TS3S 5013S

Ø5.5**Шестигранник 2.5**

Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Короткий					
	TS3S 5506S	TS3S 5507S	TS3S 5508S	TS3S 5510S	TS3S 5511S	TS3S 5513S

Ультра-Широкий**Ø6.0****Шестигранник 2.5**

Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Короткий					
	TS3S 6006S	TS3S 6007S	TS3S 6008S	TS3S 6010S	TS3S 6011S	TS3S 6013S

Ø7.0**Шестигранник 2.5**


Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Короткий					
	TS3S 7006S	TS3S 7007S	TS3S 7008S	TS3S 7010S	TS3S 7011S	TS3S 7013S

Номинальные и фактические диаметры могут незначительно отличаться.

Важно : Для установки короткого Имплантата настоятельно рекомендуется достаточный период заживления.

Имплантат TSIII BA

- Имплантат погруженного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе11°
- Супер-гидрофильная поверхность усиливает образование сгустков крови
- Базовая поверхность SA покрыта высококачественной низкокristаллическим нано-НА покрытием
- Биорезорбируемое покрытие предотвращает риск разлома или отслаивания
- Конусообразный корпус имплантата обеспечивает высокую начальную стабильность
- Мелкая резьба: Увеличение начальной стабильности в мягкой костной ткани
- Шторная резьба: обеспечивает эффективное самонарезание
- Рекомендуемый вращающий момент при вкручивании: 40 Нсм
- ※Примечание: при реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром не менее 4.5 мм

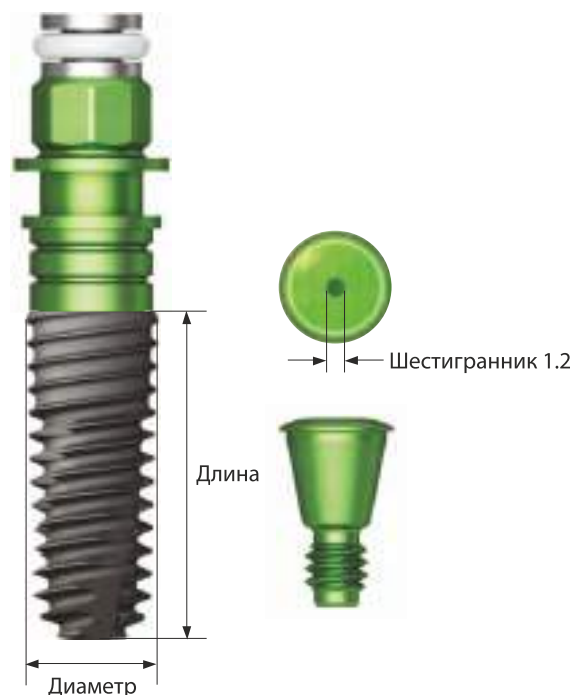

Имплантат с Установочным Адаптером

(Имплантат + Установочный Адаптер + Винт-заглушка)

Код заказа : **В** + Код имплантата (Пример : **В**TS3S4010B)

Ø3.5

Длина

8.5

10

11.5

13

Шестигранник 2.1



TS3M3508B

TS3M3510B

TS3M3511B

TS3M3513B

Ø4.0

Длина

7

8.5

10

11.5

13

Шестигранник 2.5



TS3S4007B

TS3S4008B

TS3S4010B

TS3S4011B

TS3S4013B

Ø4.5

Длина

7

8.5

10

11.5

13

Шестигранник 2.5



TS3S4507B

TS3S4508B

TS3S4510B

TS3S4511B

TS3S4513B

Ø5.0

Шестигранник 2.5



Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS3S5007B	TS3S5008B	TS3S5010B	TS3S5011B	TS3S5013B

Номинальный и фактический диаметры могут незначительно отличаться.


Имплантат TSIV SA

- Имплантат погруженного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°
- Поверхность SA подвергается пескоструйной обработке оксидом алюминия и травления кислотой
- Используется только для установки в верхнечелюстной и мягкой костной ткани
- Мелкая резьба обеспечивает повышенную начальную стабильность имплантата в мягкой кости

- Дизайн острой вершины: плотность кости D4 делает возможным установку имплантата диаметром 2 и 3 мм
- Ограниченный вращающий момент при вкручивании: 40 Нсм

Ультра-Широкий

- Используется при немедленной имплантации в лунку удаленного моляра и замене не прижившегося имплантата
- Оптимальная конструкция вершины имплантата, которая позволяет получить устойчивое начальное крепление при установке даже на 3 мм ниже лунки зуба
- Рекомендуемый вращающий момент при вкручивании: 40 Нсм
 - ※ Примечание: при реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром не более 4.5 мм
 - ※ Рекомендуемая скорость введения: ниже 15 об/мин.
 - Высокая скорость вкручивания имплантата в следствии большого шага резьбы

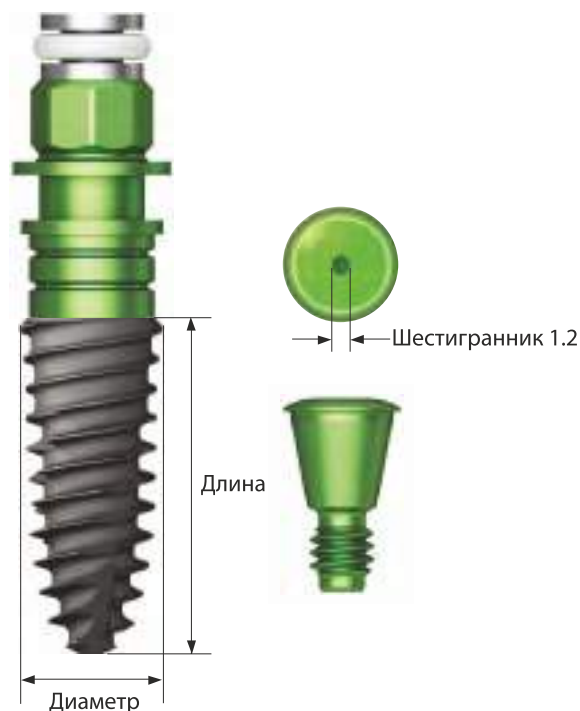

Имплантат без Установочного Адаптера

Код заказа Пример: Код Имплантата (: TS4S4010S)

Имплантат с Установочным Адаптером

(Имплантат + Установочный Адаптер + Винт-заглушка)

Код заказа : **B** + Код имплантата (Пример : **BT**TS4S4010S)

Ø4.0 Шаг 0.8

Шестигранник 2.5



Длина	7	8.5	10	11.5	13

TS4S4007S TS4S4008S TS4S4010S TS4S4011S TS4S4013S

Ø4.5 Шаг 1.0

Шестигранник 2.5



Длина	7	8.5	10	11.5	13

TS4S4507S TS4S4508S TS4S4510S TS4S4511S TS4S4513S

Ø5.0 Шаг 1.2

Шестигранник 2.5



Длина

7

8.5

10

11.5

13



TS4S5007S

TS4S5008S

TS4S5010S

TS4S5011S

TS4S5013S

Ультра-Широкий

Ø6.0

Шестигранник 2.5



Длина

7

8.5

10

11.5

13



TS4S6007S

TS4S6008S

TS4S6010S

TS4S6011S

TS4S6013S

Ø7.0

Шестигранник 2.5



Длина

7

8.5

10

11.5

13



TS4S7007S

TS4S7008S

TS4S7010S

TS4S7011S

TS4S7013S

Номинальный и фактический диаметры могут незначительно отличаться.

Установочный Адаптер и Винт-заглушка

Установочный Адаптер

- Для удаления установочного адаптера используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендованный момент при вкручивании 8-10 Нсм
- ※ **Одноразовый**; запрещено повторное использование
- Цветная маркировка для простой идентификации в ротовой полости.

M Мини

C Стандарт

M
Для Ø3.0



TSSM30



TSHAMM



TSHAMR

M

C

Винт-заглушка

- Выбор Высоты(В) зависит от глубины установки имплантата
- Отдельный Винт-заглушка выполнен специально для имплантата диаметром Ø3.0
- Используется шестигранный ключ (Момент вращения: 5-8 Нсм)
- П = Платформа

M Мини

C Стандарт

П \ Высота	0.4	1.4	2.0	
M Для Ø3.0	 GSCS30	 GSCS30M	 GSCS30L	↑ Высота ↓
	 GSCS35	 GSCS35M	 GSCS35L	↑ Высота ↓
	 GSCS40S-G	 GSCS40M-G	 GSCS40L-G	↑ Высота ↓

Формирователь Десны

- Желтый (Мини) предназначен для имплантатов диаметром Ø3.5 и Ø3.0
- Используется шестигранный ключ 1.2 (Момент вращения 5-8 Нсм)

М Мини
С Стандарт

Таблица соответствия

Формирователь Десны	Высота	3.0	4.0	5.0	7.0
Абатмент	Высота десны	1.0	2.0 или 3.0	3.0 или 4.0	5.0 более
Слепочный Модуль	Тип	Короткий	Короткий	Длинный	Длинный



Диаметр \ Высота	3.0	4.0	5.0	7.0	9.0
Ø4.0					
Ø4.5					

Диаметр \ Высота	3.0	4.0	5.0	7.0	9.0
Ø4.0					
Ø4.5					
Ø5.0					
Ø6.0					
Ø7.0					
Ø8.0	-	-		-	-

Индивидуальный Формирователь Десны

- Формирователь Десны в форме зуба
- Обтачивается и взаимодействует с композитом
- Материал: PEEK (Медицинского класса)
- В комплекте с титановым винтом
- Используется шестигранный ключ 1.2 (Момент вращения 5-8 Нсм)
- Упаковка: Формирователь Десны + Ti Винт
- П= Платформа

M Мини

C Стандарт



П \ Высота

5.0

7.0

9.0

M

Ti Винт
: GSCHABSMТ



TSCHAP**M5**



TSCHAP**M7**



TSCHAP**M9**

C

Ti Винт
: GSCHABSST



TSCHAP**R5**



TSCHAP**R7**



TSCHAP**R9**

Rigid / Transfer

Слепок с уровня Абатмента



Одиночный Мостовой
Выжигаемый Цилиндр Rigid

039 стр.



Лабораторный Аналог Rigid

039 стр.



Слепочный Модуль Rigid

038 стр.



Защитный Колпачок Rigid

038 стр.



Колпачок Rigid Retraction

038 стр.



Ключ для Абатмента Rigid,
1.2 6-гран. ключ
: Мини, Стандартный (ø 4.0) -
Установка только с ключом



Rigid Абатмент

035 стр.



Transfer Абатмент

040 стр.



1.2 Ключ 6-гран.



Винт Заглушка
030 стр.



Формирователь Десны
031 стр.



1.2 Ручной Ключ 6-гран.



TSIII SA
024 стр.



TSIII BA
026 стр.



TSIV SA
028 стр.

Rigid Абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементной фиксацией
- Слепок с уровня Абатмента
- Ø 4.0: Закручивается с помощью Ключа для Абатмента Rigid
Код изделия: ORDML/ORDMS)
- Ø4.5/ Ø5.0/ Ø6.0: Закручивается с помощью ключа для Абатмента Rigid или шестигранным ключом 1.2
- Ø7.0: Закручивается с помощью шестигранного ключа 1.2
- Рекомендованный момент при вкручивании : 30 Нсм
- Комплект : Абатмент + Защитный колпачок



Абатмент + Защитный Колпачок

Код заказа : Код изделия + P (Пример : GSRA5620P)

D Ø4.0



Высота \ Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
4.0	GSRA4410	GSRA4420	GSRA4430	GSRA4440	GSRA4450
5.5	GSRA4610	GSRA4620	GSRA4630	GSRA4640	GSRA4650
7.0	GSRA4710	GSRA4720	GSRA4730	GSRA4740	GSRA4750

D Ø4.5



Высота \ Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
4.0	GSRA4411	GSRA4421	GSRA4431	GSRA4441	GSRA4451
5.5	GSRA4611	GSRA4621	GSRA4631	GSRA4641	GSRA4651
7.0	GSRA4711	GSRA4721	GSRA4731	GSRA4741	GSRA4751

Rigid Абатмент

D Ø4.0



Высота Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
4.0	GSRAS4410	GSRAS4420	GSRAS4430	GSRAS4440	GSRAS4450
5.5	GSRAS4610	GSRAS4620	GSRAS4630	GSRAS4640	GSRAS4650
7.0	GSRAS4710	GSRAS4720	GSRAS4730	GSRAS4740	GSRAS4750

D Ø4.5



Высота Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
4.0	GSRAS4411	GSRAS4421	GSRAS4431	GSRAS4441	GSRAS4451
5.5	GSRAS4611	GSRAS4621	GSRAS4631	GSRAS4641	GSRAS4651
7.0	GSRAS4711	GSRAS4721	GSRAS4731	GSRAS4741	GSRAS4751

D Ø5.0



Высота Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
4.0	GSRA5410	GSRA5420	GSRA5430	GSRA5440	GSRA5450
5.5	GSRA5610	GSRA5620	GSRA5630	GSRA5640	GSRA5650
7.0	GSRA5710	GSRA5720	GSRA5730	GSRA5740	GSRA5750

D Ø6.0



Высота Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
4.0	GSRA6410	GSRA6420	GSRA6430	GSRA6440	GSRA6450
5.5	GSRA6610	GSRA6620	GSRA6630	GSRA6640	GSRA6650
7.0	GSRA6710	GSRA6720	GSRA6730	GSRA6740	GSRA6750

D Ø7.0

C

Высота Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
5.5					
	GSRA7610	GSRA7620	GSRA7630	GSRA7640	GSRA7650

Компоненты Rigid Абатмента

Защитный колпачок Rigid

- Защищает Rigid Абатмент и минимизирует раздражительность пациента
- Может быть использован в качестве временной коронки
- Подходит для Transfer Абатмента (за исключением $\varnothing 4.0$)

M Мини
C Стандарт

Диаметр \ Высота	4.0	5.5	7.0
$\varnothing 4.0 / \varnothing 4.0$			
$\varnothing 4.5 / \varnothing 4.5$	GSRPC440	GSRPC460	GSRPC470
$\varnothing 5.0$	GSRPC441	GSRPC461	GSRPC471
$\varnothing 6.0$	GSRPC540	GSRPC560	GSRPC570
$\varnothing 7.0$	GSRPC640	GSRPC660	GSRPC670
	-	GSRPC760	-

Колпачок Rigid Retraction

- Используется для четкого воспроизведения десневого края при снятии слепка
- Может быть использован в качестве основы для временной коронки
- Подходит для Transfer Абатмента (за исключением $\varnothing 4.0$)

M Мини
C Стандарт

Диаметр \ Высота	4.0	5.5	7.0
$\varnothing 4.0 / \varnothing 4.0$			
$\varnothing 4.5 / \varnothing 4.5$	GSRRRC440	GSRRRC460	GSRRRC470
$\varnothing 5.0$	GSRRRC441	GSRRRC461	GSRRRC471
$\varnothing 6.0$	GSRRRC540	GSRRRC560	GSRRRC570
$\varnothing 7.0$	GSRRRC640	GSRRRC660	GSRRRC670
	-	GSRRRC760	-

Слепочный Модуль Rigid

- Цвет зависит от высоты Абатмента
- Подходит для Transfer Абатмента (за исключением $\varnothing 4.0$)

M Мини
C Стандарт

Диаметр \ Высота	4.0	5.5	7.0
$\varnothing 4.0 / \varnothing 4.0$			
$\varnothing 4.5 / \varnothing 4.5$	GSRIC440S	GSRIC460S	GSRIC470S
$\varnothing 5.0$	GSRIC441S	GSRIC461S	GSRIC471S
$\varnothing 6.0$	GSRIC540S	GSRIC560S	GSRIC570S
$\varnothing 7.0$	GSRIC640S	GSRIC660S	GSRIC670S
	-	GSRIC760S	-

Выжигаемый Цилиндр Rigid

- Используется после литья, очищайте десневой край для правильной установки

M Мини
C Стандарт

Диаметр \ Тип

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 4.5 / Ø 4.5
Ø 5.0
Ø 6.0
Ø 7.0

Одиночный Мостовидный



GSRP400S

GSRP400B

GSRP450S

GSRP450B

GSRP500S

GSRP500B

GSRP600S

GSRP600B

GSRP700S

GSRP700B

Лабораторный Аналог Rigid

- Соединяется со Слечным Модулем соответствующего цвета

M Мини
C Стандарт

Диаметр \ Высота

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 4.5 / Ø 4.5
Ø 5.0
Ø 6.0
Ø 7.0

4.0

5.5

7.0



GSRLA440

GSRLA460

GSRLA470

GSRLA441

GSRLA461

GSRLA471

GSRLA540

GSRLA560

GSRLA570

GSRLA640

GSRLA660

GSRLA670

-

GSRLA760

-

Transfer Абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементной фиксацией
- Слепок с уровня Имплантата
- Слепок с уровня Абатмента доступен с применением Слепочного модуля Rigid (за исключением Ø4.0)
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендованный момент при вкручивании: 20Нсм (Мини), 30Нсм (Стандарт)
- Упаковка : Абатмент + EbonyGold винт



Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа : Код изделия + **WH** (Пример : GSTA4621**WH**)

D Ø4.0		Высота	Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
M								
EbonyGold винт								
: GSABSM								
Невозможен слепок с уровня Абатмента								
Шестигранник	5.5	GSTA4612	GSTA4622	GSTA4632	GSTA4642	GSTA4652		
	7.0	GSTA4712	GSTA4722	GSTA4732	GSTA4742	GSTA4752		
Без шестигранника	5.5	GSTA4612N	GSTA4622N	GSTA4632N	GSTA4642N	GSTA4652N		
	7.0	GSTA4712N	GSTA4722N	GSTA4732N	GSTA4742N	GSTA4752N		

D Ø4.5		Высота	Высота Десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
M								
EbonyGold винт								
: GSABSM								
Шестигранник	5.5	GSTA4611	GSTA4621	GSTA4631	GSTA4641	GSTA4651		
	7.0	GSTA4711	GSTA4721	GSTA4731	GSTA4741	GSTA4751		
Без шестигранника	5.5	GSTA4611N	GSTA4621N	GSTA4631N	GSTA4641N	GSTA4651N		
	7.0	GSTA4711N	GSTA4721N	GSTA4731N	GSTA4741N	GSTA4751N		

D Ø4.5Высота
Высота
Десны**1.0****2.0****3.0****4.0****5.0**EbonyGold винт
: GSABSS

Шестигранник

5.5

GSTAS4611

GSTAS4621

GSTAS4631

GSTAS4641

GSTAS4651

7.0

GSTAS4711

GSTAS4721

GSTAS4731

GSTAS4741

GSTAS4751

Без шестигранника

5.5

GSTAS4611N

GSTAS4621N

GSTAS4631N

GSTAS4641N

GSTAS4651N

7.0

GSTAS4711N

GSTAS4721N

GSTAS4731N

GSTAS4741N

GSTAS4751N

D Ø5.0Высота
Высота
Десны**1.0****2.0****3.0****4.0****5.0**EbonyGold винт
: GSABSS

Шестигранник

4.0

GSTA5410

GSTA5420

GSTA5430

GSTA5440

GSTA5450

5.5

GSTA5610

GSTA5620

GSTA5630

GSTA5640

GSTA5650

7.0

GSTA5710

GSTA5720

GSTA5730

GSTA5740

GSTA5750

Без шестигранника

4.0

GSTA5410N

GSTA5420N

GSTA5430N

GSTA5440N

GSTA5450N

5.5

GSTA5610N

GSTA5620N

GSTA5630N

GSTA5640N

GSTA5650N

7.0

GSTA5710N

GSTA5720N

GSTA5730N

GSTA5740N

GSTA5750N

D Ø6.0Высота
Высота
Десны**1.0****2.0****3.0****4.0****5.0**EbonyGold винт
: GSABSS

Шестигранник

4.0

GSTA6410

GSTA6420

GSTA6430

GSTA6440

GSTA6450

5.5

GSTA6610

GSTA6620

GSTA6630

GSTA6640

GSTA6650

7.0

GSTA6710

GSTA6720

GSTA6730

GSTA6740

GSTA6750

Без шестигранника

4.0

GSTA6410N

GSTA6420N

GSTA6430N

GSTA6440N

GSTA6450N

5.5

GSTA6610N

GSTA6620N

GSTA6630N

GSTA6640N

GSTA6650N

7.0

GSTA6710N

GSTA6720N

GSTA6730N

GSTA6740N

GSTA6750N

D Ø7.0Высота
Высота
Десны**1.0****2.0****3.0****4.0****5.0**EbonyGold винт
: GSABSS

Шестигранник

5.5

GSTA7610

GSTA7620

GSTA7630

GSTA7640

GSTA7650

Без шестигранника

5.5

GSTA7610N

GSTA7620N

GSTA7630N

GSTA7640N

GSTA7650N

Компоненты Transfer Абатмента

Лабораторный Винт

- Лабораторный Винт : Используется в лабораторных условиях вместо ключа для Абатмента
- Вощенный Винт : Используется при формировании канала и использованием переносного винта или при снятии восковых слепков
- Упаковка : Лабораторный Винт, Вощенный Винт

M Мини
C Стандарт

Лабораторный
Винт

Вощенный
Винт

M



GSABSMML



GSABSMW

C



GSABSSL



GSABSSW

Лабораторный Аналог

- Лабораторный Аналог для снятия слепка с уровня Имплантата
- Выберите соответствующий размер согласно диаметру Имплантата $\geq \varnothing 3,0 / \geq \varnothing 3,5 / \geq \varnothing 4,0$

M Мини
C Стандарт

M

Для $\varnothing 3,0$



GSTLA300

M



GSTLA350

C



GSTLA400

Bite Index

- Используется для фиксации прикуса на слепке на уровне имплантата
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Упаковка : Bite Index 2шт

M Мини

C Стандарт

Диаметр \ Высота	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
					
Ø 4.5	GSBIM4504S	GSBIM4506S	GSBIM4508S	GSBIM4510S	GSBIM4512S
Ø 5.5	GSBIS5504S	GSBIS5506S	GSBIS5508S	GSBIS5510S	GSBIS5512S

Компоненты Transfer Абатмента

Слепочный модуль для открытой ложки

- Открытая конструкция для снятия слепка с использованием открытой ложки
- Слепочный трансфер типа "отверстие в отверстие".
Отсутствует необходимость фиксации с помощью смолы
- Асимметричная структура, минимизирующая интерференцию при контакте
- Удобство за счет использования длинных и коротких типов
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Упаковка: Слепочный Модуль + Направляющий Пин(*)



Мини (Желтый)



Стандарт (Серебристый)

Диаметр \ Длина	11	
	Шестигранник	Без шестигранника
Ø 4.0	GSPIM4011	GSPIM4011N
Ø 4.5	GSPIM4511	GSPIM4511N
Ø 4.0	GSPIS4011	GSPIS4011N
Ø 4.5	GSPIS4511	GSPIS4511N
Ø 5.0	GSPIS5011	GSPIS5011N
Ø 6.0	GSPIS6011	GSPIS6011N
Ø 7.0	GSPIS7011	GSPIS7011N

Направляющий Пин

0	5.0	9.0
GSPGPM100	GSPGPM 150*	GSPGPM 150L
GSPGPR100	GSPGPR 150*	GSPGPR 150L

Диаметр \ Длина	15	
	Шестигранник	Без шестигранника
Ø 4.0	GSPIM4015	GSPIM4015N
Ø 4.5	GSPIM4515	GSPIM4515N
Ø 4.0	GSPIS4015	GSPIS4015N
Ø 4.5	GSPIS4515	GSPIS4515N
Ø 5.0	GSPIS5015	GSPIS5015N
Ø 6.0	GSPIS6015	GSPIS6015N
Ø 7.0	GSPIS7015	GSPIS7015N

Направляющий Пин

0	5.0	9.0
GSPGPM 100L	GSPGPM 150L*	GSPGPM 200L
GSPGPR100L	GSPGPR 150L*	GSPGPR 200L

Слепочный модуль для закрытой ложки


- Переходный тип для снятия слепка с использованием стандартной закрытой ложки
- Треугольная арочная конструкция улучшает маркировочную способность после снятия слепка
- Шестигранник - двусоставный, без шестигранника - односоставный
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Упаковка :
 - Шестигранник : Слепочный Модуль + Направляющий Пин
 - Без шестигранника : Слепочный трансфер

- М** **Мини** (Желтый)
- С** **Стандарт** (Серебристый)

Диаметр \ Длина	11		14	
	Шестигранник	Без шестигранника	Шестигранник	Без шестигранника
				
Ø 4.0	GSTIM4011	GSTIM4011N	GSTIM4014	GSTIM4014N
Ø 4.5	GSTIM4511	GSTIM4511N	GSTIM4514	GSTIM4514N
Ø 4.0	GSTIS4011	GSTIS4011N	GSTIS4014	GSTIS4014N
Ø 4.5	GSTIS4511	GSTIS4511N	GSTIS4514	GSTIS4514N
Ø 5.0	GSTIS5011	GSTIS5011N	GSTIS5014	GSTIS5014N
Ø 6.0	GSTIS6011	GSTIS6011N	GSTIS6014	GSTIS6014N
Ø 7.0	GSTIS7011	GSTIS7011N	GSTIS7014	GSTIS7014N

Transfer / Angled / FreeForm ST / NP-Cast

Слепок с уровня Имплантата

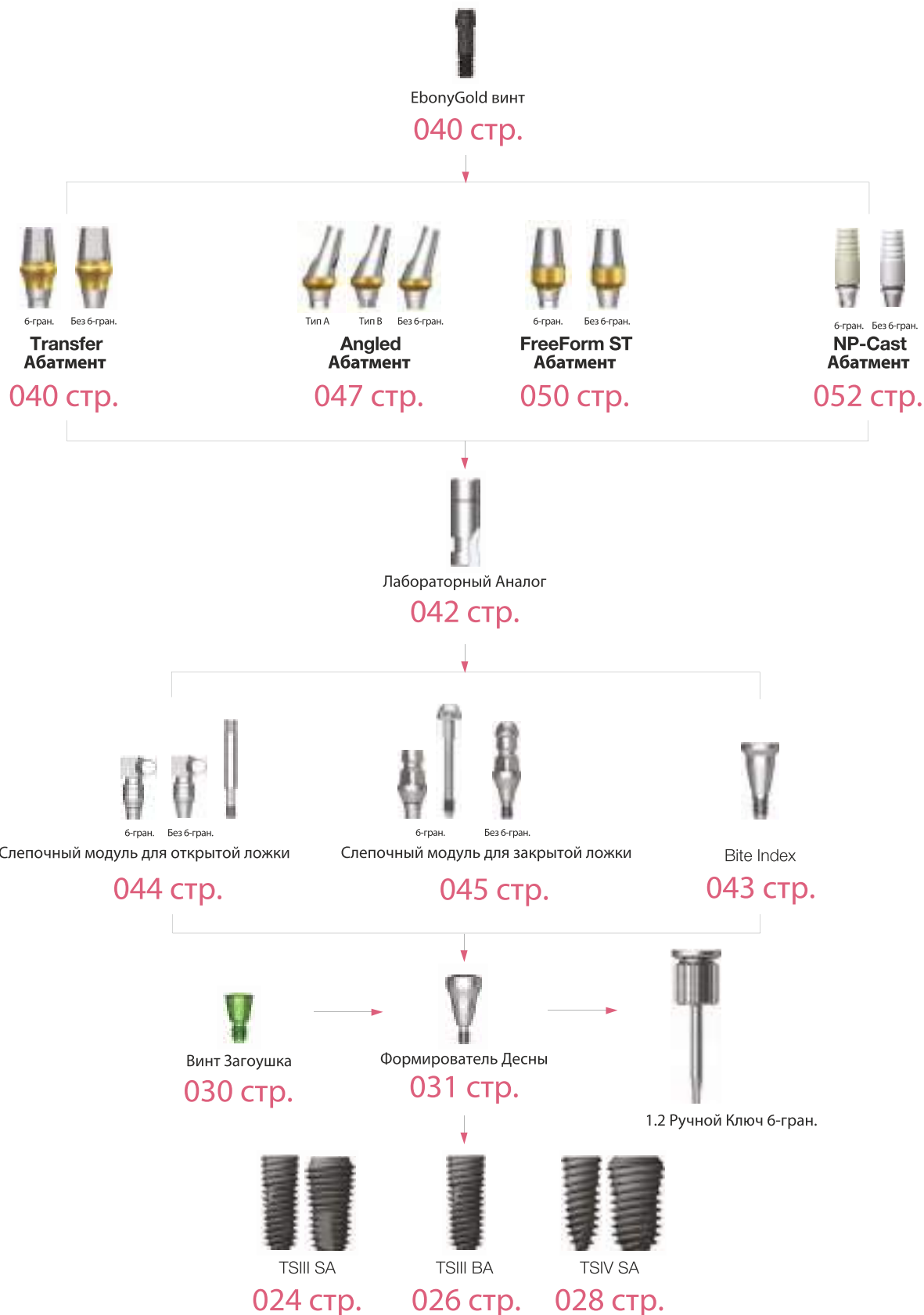

Угловой Абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементной фиксацией
- Угловая компенсация 23° без необходимости обрезки
- Используется для регулировки направления протеза, если угол оси имплантата равен 17°
- Золотой цвет Абатмента соответствует натуральному цвету десны
- Функция двойного шестигранника типа А и В
- Благодаря угловым селекторам можно с точностью подобрать нужный Абатмент
- Слепок с уровня Имплантата
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм (Мини), 20 Нсм (Стандарт)
- Упаковка: Абатмент + EbonyGold винт



Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа : Код изделия + **WH**

(Пример : GSAA5020**AWH**)

D Ø4.0



EbonyGold винт
: GSABSM

Высота
Десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.



GSAA 4020MA



GSAA4020MB



GSAA4020MN



GSAA 4040MA



GSAA 4040MB



GSAA4040MN

D Ø4.5



EbonyGold винт
: GSABSM

Высота
Десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.



GSAA 4520MA



GSAA4520MB



GSAA4520MN



GSAA 4540MA



GSAA 4540MB



GSAA4540MN

Угловой Абатмент

D Ø4.5



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота
Десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.



GSAA4520A



GSAA4520B



GSAA4520N



GSAA4540A



GSAA4540B



GSAA4540N

D Ø5.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота
Десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.



GSAA5020A



GSAA5020B



GSAA5020N



GSAA5040A



GSAA5040B



GSAA5040N

D Ø6.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота
Десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

Без 6-гран.



GSAA6020A



GSAA6020B



GSAA6020N



GSAA6040A



GSAA6040B



GSAA6040N