

Последовательность сверления - 122 Коническое Сверло

TSIII SA/BA

(Длина : 10мм)

Ø3.0мм




Качество Кости	Ø 2.2 Спиральное Сверло	Ø 2.7 Спиральное Сверло	F3.5 Коническое Сверло	Ø 3.5 Имплантат
Мягкая	►			Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		
Твердая	►		►	

Ø3.5мм



Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F4.0 Коническое Сверло	Ø 3.5 Имплантат
Мягкая	►			Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		
Твердая	►	►	►	

Ø4.0мм

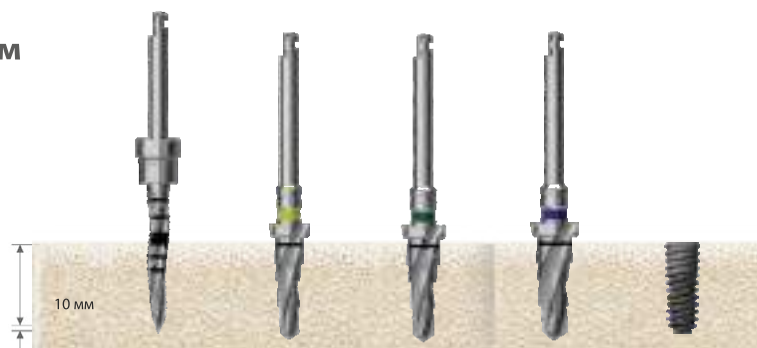


Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F4.0 Коническое Сверло	F4.5 Коническое Сверло	Ø 4.0 Имплантат
Мягкая	►	►			Размещение Имплантата
Нормальная	►	►	►		
Твердая	►	►		►	

Рекомендуемый момент кручения : ≤40 Нсм


Глубина вставки Имплантата TS: в нормальную / твердую кости Имплантат должен быть помещен на 1 мм глубже уровня кости. В мягкую кость Имплантат должен быть вставлен на уровне кости для большей стабильности.

Ø4.5mm

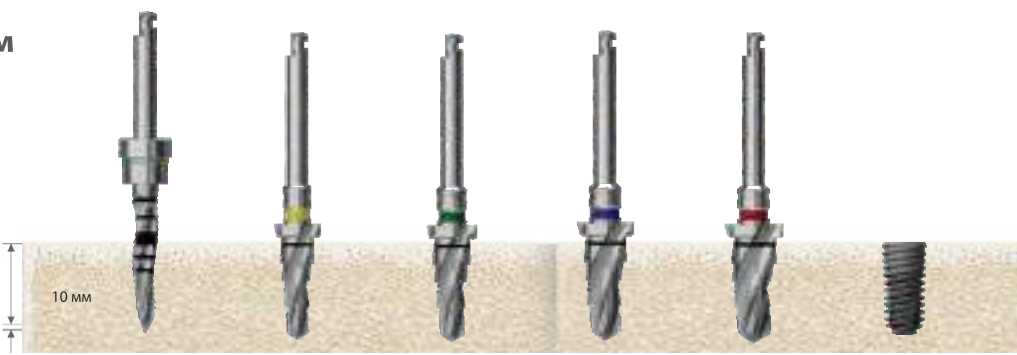

Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F4.0 Коническое Сверло	F4.5 Коническое Сверло	F5.0 Коническое Сверло	Ø 4.5 Имплантат
Мягкая	►		►			Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		►		
Твердая	►	►			►	

Ø5.0mm

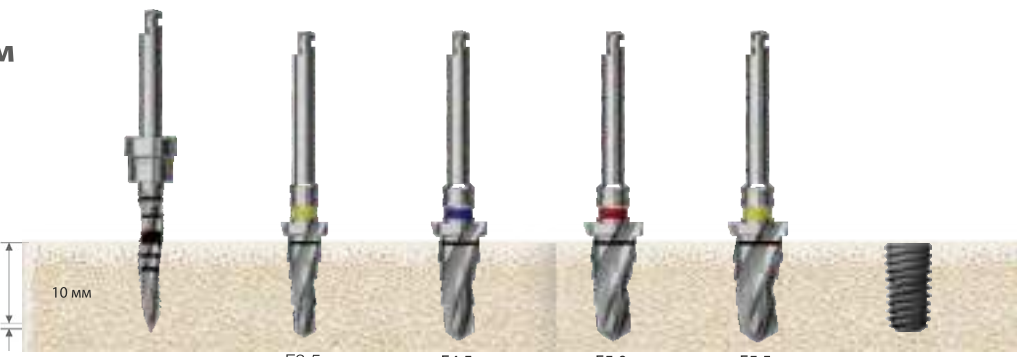

Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F4.5 Коническое Сверло	F5.0 Коническое Сверло	F5.5 Коническое Сверло	Ø 5.0 Имплантат
Мягкая	►		►			Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		►		
Твердая	►	►		►	►	

Ø5.5mm




Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F5.0 Коническое Сверло	F5.5 Коническое Сверло	F6.0 Коническое Сверло	Ø 5.5 Имплантат
Мягкая	►		►			Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		►		
Твердая	►	►		►	►	

Последовательность сверления - 122 Коническое Сверло

TSIII Ультра-Широкий Имплантат


(Длина : 10мм)

Ø6.0мм

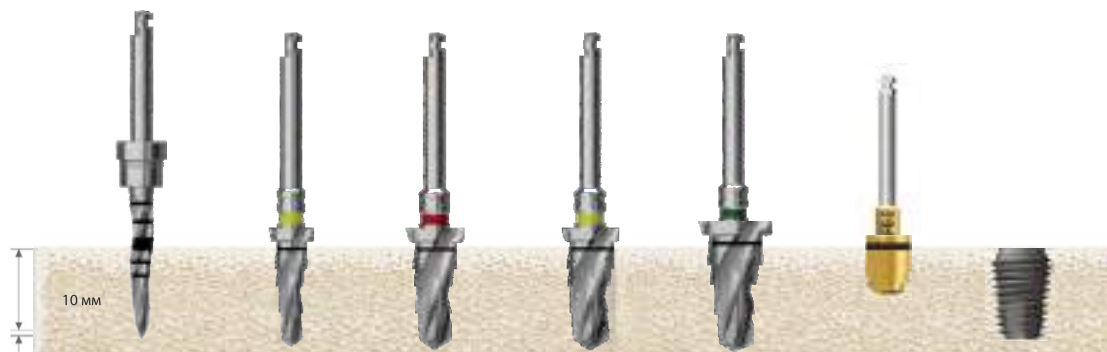

Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F5.0 Коническое Сверло	F5.5 Коническое Сверло	F6.0 Коническое Сверло	F6.0 Кортикальное Сверло	Ø 6.0 Имплантат
Мягкая	►		►				Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		►			
Твердая	►	►		►	►		

Ø7.0мм

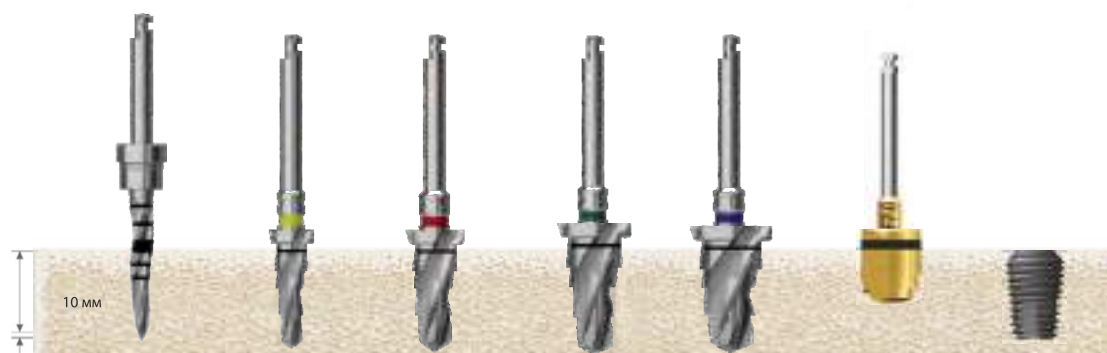

Качество кости	Направляющее Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F5.0 Коническое Сверло	F6.0 Коническое Сверло	F7.0 Коническое Сверло	F7.0 Кортикальное Сверло	Ø 7.0 Имплантат
Мягкая	►		►				Размещение Имплантата
Нормальная	►	►		►			
Твердая	►	►		►	►		

Рекомендуемый момент кручения : ≤40 Нсм

Глубина вставки Имплантата TS: в нормальную / твердую кости Имплантат должен быть помещен на 1 мм глубже уровня кости. В мягкую кость Имплантат должен быть вставлен на уровне кости для большей стабильности.

Последовательное сверление - 122 Коническое Сверло

TSIV SA

(Длина : 10мм)

Ø 4.0мм




Качество кости	Ø 2.2 Спиральное Сверло	F3.5 Коническое Сверло	Ø 4.0 Имплантат
D4	►		Размещение Имплантата
Мягкая	►	►	

Ø 4.5мм



Качество кости	Ø 2.2 Спиральное Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F4.0 Коническое Сверло	Ø 4.5 Имплантат
D4		►		Размещение Имплантата
Мягкая	►		►	

Ø 5.0мм

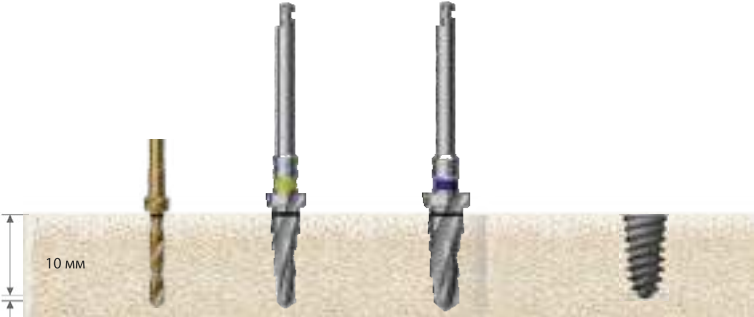

Качество кости	Ø 2.2 Спиральное Сверло	F3.5 Коническое Сверло	F4.5 Коническое Сверло	Ø 4.5 Имплантат
D4		►		Размещение Имплантата
Мягкая	►		►	


Рекомендуемый момент кручения : ≤40 Нсм

Система TSIV разработана специально для верхнечелюстной пазухи и мягкой кости

※ Рекомендуется уменьшить скорость вставки до 15 об/мин или ниже


Последовательность сверления - 122 Коническое Сверло TSIV Ультра-Широкий Имплантат

Ø 6.0мм

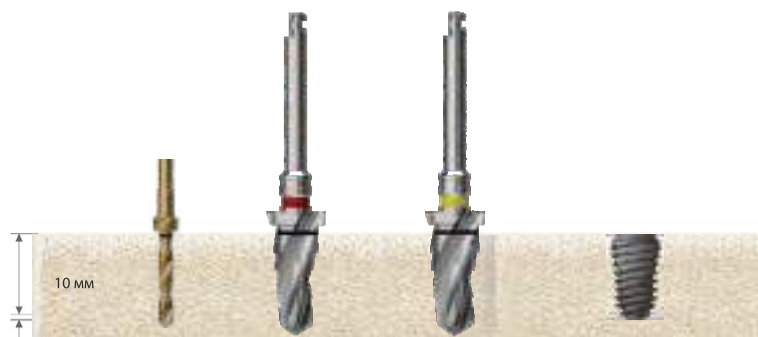

Качество кости	Ø 2.2 Спиральное Сверло	F5.0 Коническое Сверло	F5.5 Коническое Сверло	Ø 6.0 Имплантат
D4	►	►		Размещение Имплантата
Мягкая	►	►	►	

Ø 7.0мм

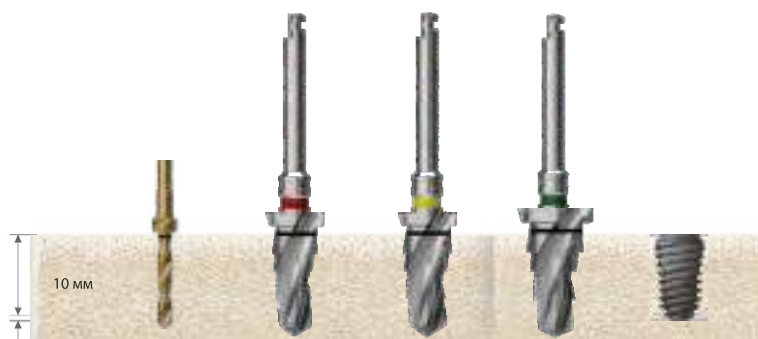

Качество кости	Ø 2.2 Спиральное Сверло	F5.0 Коническое Сверло	F5.5 Коническое Сверло	F6.0 Коническое Сверло	Ø 6.0 Имплантат
D4	►	►	►		Размещение Имплантата
Мягкая	►	►	►	►	

Рекомендованный момент кручения : ≤ 40 Нсм

Последовательность сверления - Прямое сверло

MS

(Длина : 10мм)

Ø1.8



Качество кости	Копьевидное Сверло	Ø 1.8 Имплантат
Мягкая	►	Размещение Имплантата
Нормальная	►	
Твердая	►	

Ø2.5



Качество кости	Ø 1.8 Сверло	Ø 2.3 Сверло	Ø 2.5 Имплантат
Мягкая	►		Размещение Имплантата
Нормальная	►		
Твердая		►	

Ø3.0



Качество кости	Ø 1.8 Сверло	Ø 2.3 Сверло	Ø 3.0 Имплантат
Мягкая	►	►	Размещение Имплантата
Нормальная	►	►	
Твердая	►	►	

Рекомендованный момент кручения : 30 Нсм

Последовательность сверления - Прямое сверло

MS

(Длина : 10мм)

Ø1.8



Качество кости	Копьевидное Сверло	Ø 1.8 Имплантат
Мягкая	►	Размещение Имплантата
Нормальная	►	
Твердая	►	

Ø2.5



Качество кости	Ø 1.8 Сверло	Ø 2.3 Сверло	Ø 2.5 Имплантат
Мягкая	►		Размещение Имплантата
Нормальная	►		
Твердая		►	

Ø3.0



Качество кости	Ø 1.8 Сверло	Ø 2.3 Сверло	Ø 3.0 Имплантат
Мягкая	►	►	Размещение Имплантата
Нормальная	►	►	
Твердая	►	►	

Рекомендованный момент кручения : 30 Нсм