

Установочный адаптер и винт-заглушка

Установочный адаптер

- Для удаления установочного адаптера используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании 8 -10 Нсм
- **Одноразовый**, запрещено повторное использование
- Цветная маркировка для простой идентификации в ротовой полости



Мини



Стандарт



Для Ø3.0



TSSM30



TSHAMM



TSHAMR

Винт-заглушка

- Цветовая маркировка для идентификации винта-заглушки к имплантату: фиолетовый и синий – мини, зелёный – стандарт
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании 5-8 Нсм



Мини




Стандарт

П \ Высота

4.0




Для Ø3.0

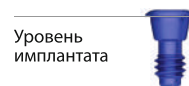


Уровень имплантата

GSCS30

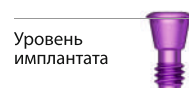

Уровень имплантата

GSCS35

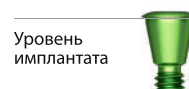

Уровень имплантата

GSCS40S-G

Формирователь десны

- Желтый (мини) предназначен для имплантатов диаметром Ø3.5 и Ø3.0
- Используется шестигранный ключ 1.2 (момент вращения 5-8 Нсм)


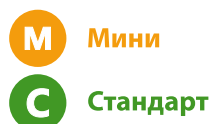


Таблица соответствия

Формирователь десны	Высота	3.0	4.0	5.0	7.0
Абатмент	Высота десны	1.0	2.0 или 3.0	3.0 или 4.0	5.0 более
Слепочный модуль	Тип	Короткий	Короткий	Длинный	Длинный

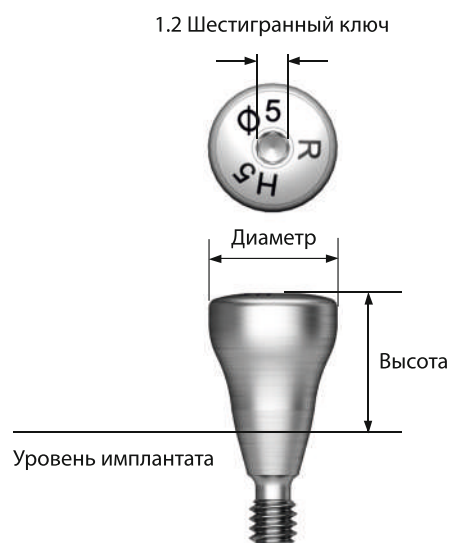

Высота \ Диаметр	3.5	4.0	5.0	7.0	9.0
4.0					
4.5	TSHA453M	TSHA454M	TSHA455M	TSHA457M	TSHA459M


Высота \ Диаметр	3.0	4.0	5.0	7.0	9.0
4.0					
4.5	TSHA453R	TSHA454R	TSHA455R	TSHA457R	TSHA459R
5.0	TSHA503R	TSHA504R	TSHA505R	TSHA507R	TSHA509R
6.0	TSHA603R	TSHA604R	TSHA605R	TSHA607R	TSHA609R
7.0	TSHA703R	TSHA704R	TSHA705R	TSHA707R	TSHA709R
8.0	-	-	TSHA805R	-	-

Индивидуальный формирователь десны

- Формирователь десны в форме зуба
- Обтачивается и взаимодействует с композитом
- Материал: РЕЕК (медицинского класса)
- В комплекте с титановым винтом
- Используется шестигранный ключ 1.2 (момент вращения 5-8 Нсм)
- Комплект: формирователь десны + Тi винт
- П=Платформа

М Мини


С Стандарт

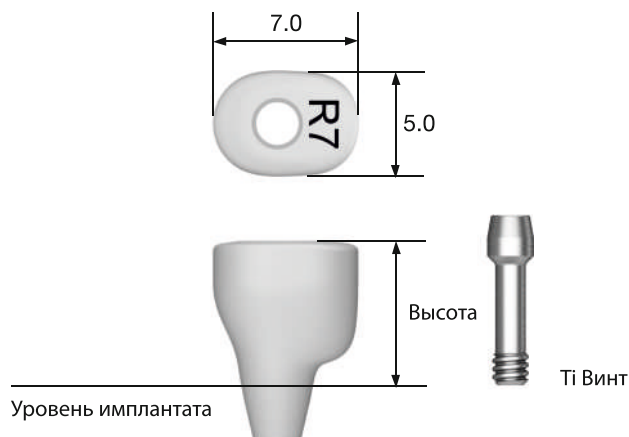


П \ Высота	5.0	7.0	9.0
М Тi Винт : GSCHABSMT	 TSCHAP M5	 TSCHAP M7	 TSCHAP M9
С Тi Винт : GSCHABSST	 TSCHAP R5	 TSCHAP R7	 TSCHAP R9

Transfer / Angled / FreeForm ST / NP-Cast

Слепок с уровня имплантата

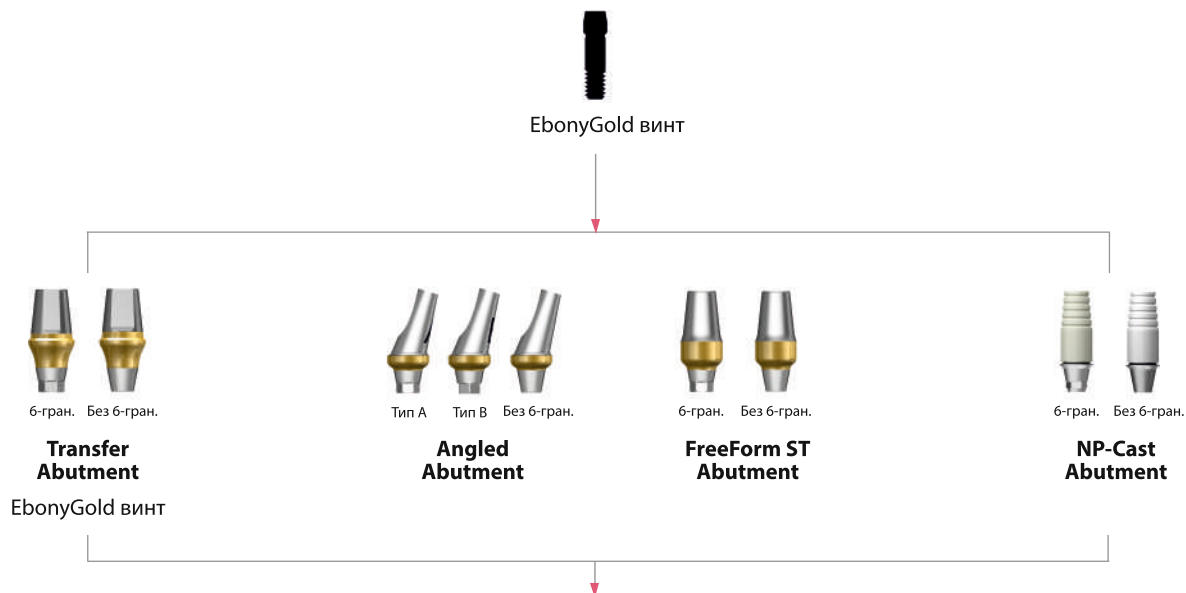

Лабораторный аналог

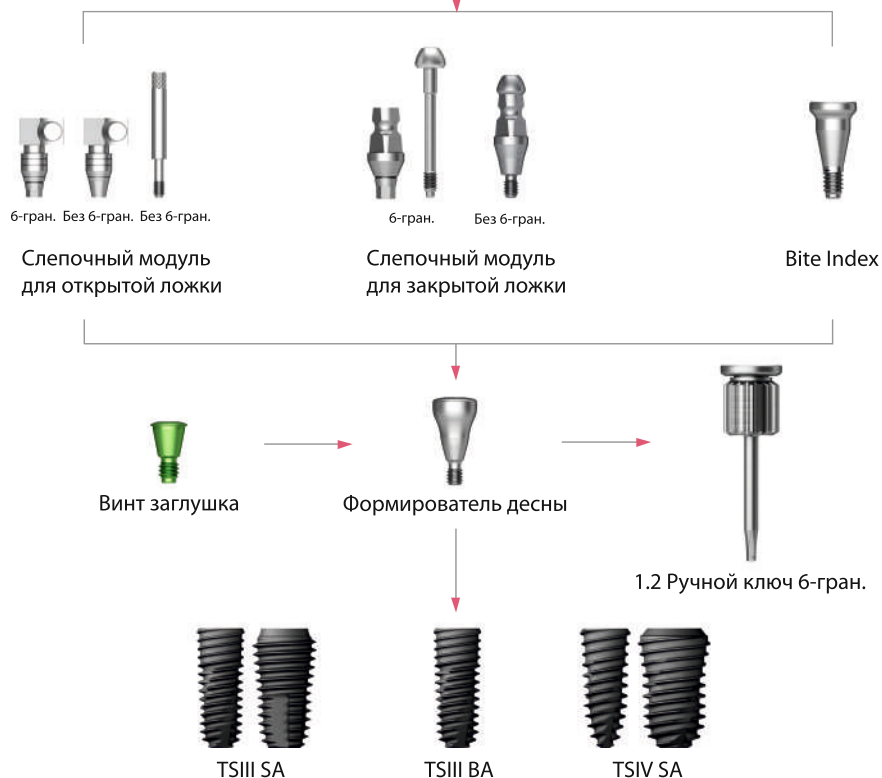

Transfer абатмент

- Применяется с цементной фиксацией при общем протезировании
- Слпок с уровня имплантата
- Слпок с уровня абатмента доступен с применением слепочного модуля
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендованный крутящий момент: 20 Нсм (мини), 30 Нсм (стандарт)
- Комплект: абатмент + EbonyGold винт

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: GSTA621**WH**)



D Ø 4.0



EbonyGold винт

: GSABSM

Невозможен слпок с уровня абатмента

		Высота	Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
6-гран.	5.5							
	7.0			GSTA4612	GSTA4622	GSTA4632	GSTA4642	GSTA4652
без 6-гран.	5.5			GSTA4712	GSTA4722	GSTA4732	GSTA4742	GSTA4752
	7.0			GSTA4612N	GSTA4622N	GSTA4632N	GSTA4642N	GSTA4652N
				GSTA4712N	GSTA4722N	GSTA4732N	GSTA4742N	GSTA4752N

D Ø 4.5



EbonyGold винт

: GSABSM

		Высота	Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
6-гран.	5.5							
	7.0			GSTA4611	GSTA4621	GSTA4631	GSTA4641	GSTA4651
без 6-гран.	5.5			GSTA4711	GSTA4721	GSTA4731	GSTA4741	GSTA4751
	7.0			GSTA4611N	GSTA4621N	GSTA4631N	GSTA4641N	GSTA4651N
				GSTA4711N	GSTA4721N	GSTA4731N	GSTA4741N	GSTA4751N

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSS

		Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
6-гран.	5.5						
	7.0		GSTAS4711	GSTAS4721	GSTAS4731	GSTAS4741	GSTAS4751
без 6-гран.	5.5		GSTAS4611N	GSTAS4621N	GSTAS4631N	GSTAS4641N	GSTAS4651N
	7.0		GSTAS4711N	GSTAS4721N	GSTAS4731N	GSTAS4741N	GSTAS4751N

D Ø 5.0



EbonyGold винт
: GSABSS

		Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
6-гран.	4.0						
	5.5		GSTA5610	GSTA5620	GSTA5630	GSTA5640	GSTA5650
	7.0		GSTA5710	GSTA5720	GSTA5730	GSTA5740	GSTA5750
без 6-гран.	4.0		GSTA5410N	GSTA5420N	GSTA5430N	GSTA5440N	GSTA5450N
	5.5		GSTA5610N	GSTA5620N	GSTA5630N	GSTA5640N	GSTA5650N
	7.0		GSTA5710N	GSTA5720N	GSTA5730N	GSTA5740N	GSTA5750N

D Ø 6.0



EbonyGold винт
: GSABSS

		Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
6-гран.	4.0						
	5.5		GSTA6610	GSTA6620	GSTA6630	GSTA6640	GSTA6650
	7.0		GSTA6710	GSTA6720	GSTA6730	GSTA6740	GSTA6750
без 6-гран.	4.0		GSTA6410N	GSTA6420N	GSTA6430N	GSTA6440N	GSTA6450N
	5.5		GSTA6610N	GSTA6620N	GSTA6630N	GSTA6640N	GSTA6650N
	7.0		GSTA6710N	GSTA6720N	GSTA6730N	GSTA6740N	GSTA6750N

D Ø 7.0



EbonyGold винт
: GSABSS

		Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
6-гран.	5.5						
без 6-гран.	5.5		GSTA7610N	GSTA7620N	GSTA7630N	GSTA7640N	GSTA7650N

Transfer абатмент

Компоненты

Лабораторный винт

- Лабораторный винт: используется в лабораторных условиях вместо ключа для абатмента
- Вощеный винт: используется при формировании канала и использованием переносного винта или при снятии восковых слепков
- Упаковка: лабораторный винт, вощеный винт

M Мини
C Стандарт

Лабораторный
винт

Вощеный
винт

M



GSABSMML



GSABSMW

C



GSABSSL



GSABSSW

Лабораторный аналог

- Лабораторный аналог для снятия слепка с уровня имплантата
- Выберите соответствующий размер согласно диаметру имплантата $\geq \varnothing 3.0$ / $\geq \varnothing 3.5$ / $\geq \varnothing 4.0$

M Мини
C Стандарт

M

Для $\varnothing 3.0$



GSTLA300

M



GSTLA350

C



GSTLA400

Bite Index (индекс прикуса)

- Используется для фиксации прикуса на слепке на уровне имплантата
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Упаковка : Bite Index 2шт



M Мини


C Стандарт

Диаметр \ Высота	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
ø4.5	 GSBIM4504S	 GSBIM4506S	 GSBIM4508S	 GSBIM4510S	 GSBIM4512S
ø5.5	GSBIS5504S	GSBIS5506S	GSBIS5508S	GSBIS5510S	GSBIS5512S

Transfer абатмент Компоненты

Слепочный модуль для открытой ложки

- Открытая конструкция для снятия слепка с использованием открытой ложки
- Слепочный трансфер типа "отверстие в отверстие".
Отсутствует необходимость фиксации с помощью смолы
- Ассиметричная структура, минимизирующая интерференцию при контакте
- Удобство за счет использования длинных и коротких типов
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Упаковка: слепочный модуль+ направляющий пин(*)

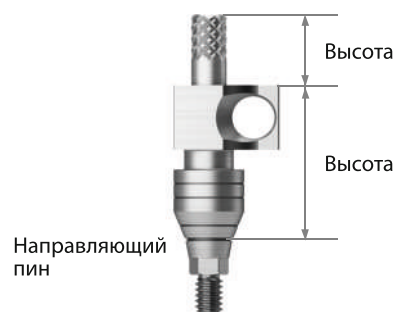

M Мини (Желтый)

C Стандарт (Зеленый)

Диаметр \ Высота		11		Направляющий пин		
Тип		6-гран.	без 6-гран.	0	5.0	9.0
						
Ø 4.0	GSPIM4011	GSPIM4011N	}	GSPGPM100	GSPGPM 150*	GSPGPM 150L
Ø 4.5	GSPIM4511	GSPIM4511N				
Ø 4.0	GSPIS4011	GSPIS4011N	}			
Ø 4.5	GSPIS4511	GSPIS4511N				
Ø 5.0	GSPIS5011	GSPIS5011N		GSPGPR100	GSPGPR 150*	GSPGPR 150L
Ø 6.0	GSPIS6011	GSPIS6011N				
Ø 7.0	GSPIS7011	GSPIS7011N				

Диаметр \ Высота		15		Направляющий пин		
Тип		6-гран.	без 6-гран.	0	5.0	9.0
						
Ø 4.0	GSPIM4015	GSPIM4015N	}	GSPGPM 100L	GSPGPM 150L*	GSPGPM 200L
Ø 4.5	GSPIM4515	GSPIM4515N				
Ø 4.0	GSPIS4015	GSPIS4015N	}			
Ø 4.5	GSPIS4515	GSPIS4515N				
Ø 5.0	GSPIS5015	GSPIS5015N		GSPGPR100L	GSPGPR 150L*	GSPGPR 200L
Ø 6.0	GSPIS6015	GSPIS6015N				
Ø 7.0	GSPIS7015	GSPIS7015N				

Слепочный модуль для закрытой ложки

- Гереходный тип для снятия слепка с использованием стандартной закрытой ложки
- Треугольная арочная конструкция улучшает маркировочную способность после снятия слепка
- Шестигранник-двусоставный, без шестигранника - односоставный
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Упаковка:
 - Шестигранник: слепочный модуль + направляющий пин
 - Без шестигранника : слепочный трансфе



Мини (Желтый)




Стандарт (Зеленый)

Диаметр \ Высота	11		14.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
				
ø 4.0	GSTIM4011	GSTIM4011N	GSTIM4014	GSTIM4014N
ø 4.5	GSTIM4511	GSTIM4511N	GSTIM4514	GSTIM4514N
ø 4.0	GSTIS4011	GSTIS4011N	GSTIS4014	GSTIS4014N
ø 4.5	GSTIS4511	GSTIS4511N	GSTIS4514	GSTIS4514N
ø 5.0	GSTIS5011	GSTIS5011N	GSTIS5014	GSTIS5014N
ø 6.0	GSTIS6011	GSTIS6011N	GSTIS6014	GSTIS6014N
ø 7.0	GSTIS7011	GSTIS7011N	GSTIS7014	GSTIS7014N

Угловой абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементной фиксацией
- Угловая компенсация 23 ° без необходимости обрезки
- Используется для регулировки направления протеза, если угол оси имплантата равен 17 °
- Золотой цвет Абатмента соответствует натуральному цвету десны
- Функция двойного шестигранника типа А и В
- Благодаря угловым селекторам можно с точностью подобрать нужный Абатмент
- Слепок с уровня Имплантата
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм (Мини), 20 Нсм (Стандарт)
- Упаковка: абатмент + EbonyGold винт

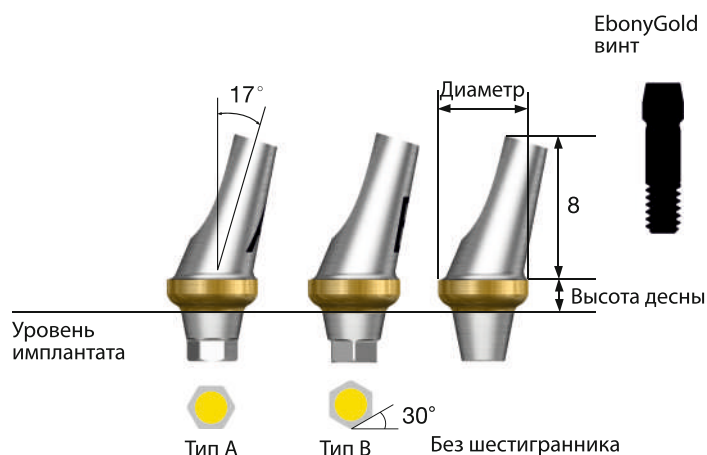

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: GSAA5020A**WH**)

D Ø 4.0



EbonyGold винт
: GSABSM

Высота десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

без 6-гран.



GSAA 4020MA



GSAA 4020MB



GSAA 4020MN



GSAA 4040MA



GSAA 4040MB



GSAA 4040MN

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSM

Высота десны

2.0

4.0

Тип

6-гран. А

6-гран. В

без 6-гран.

6-гран. А

6-гран. В

без 6-гран.



GSAA 4520MA



GSAA 4520MB



GSAA 4520MN



GSAA 4540MA



GSAA 4540MB



GSAA 4540MN

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота
десны

2.0

4.0

Тип **6-гран. А** **6-гран. В** **без 6-гран.** **6-гран. А** **6-гран. В** **без 6-гран.**



GSAA4520A



GSAA4520B



GSAA4520N



GSAA4540A



GSAA4540B



GSAA4540N

D Ø 5.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота
десны

2.0

4.0

Тип **6-гран. А** **6-гран. В** **без 6-гран.** **6-гран. А** **6-гран. В** **без 6-гран.**



GSAA5020A



GSAA5020B



GSAA5020N



GSAA5040A



GSAA5040B



GSAA5040N

D Ø 6.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота
десны

2.0

4.0

Тип **6-гран. А** **6-гран. В** **без 6-гран.** **6-гран. А** **6-гран. В** **без 6-гран.**



GSAA6020A



GSAA6020B



GSAA6020N



GSAA6040A



GSAA6040B



GSAA6040N

FreeForm ST абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементной фиксацией
- Используется для индивидуального протезирования
- Слепок с уровня Имплантата
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм (Мини), 30 Нсм (Стандарт)
- Упаковка : Абатмент + EbonyGold винт

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**
(например: GSFA5015**WH**)



СИСТЕМА TS

044

D Ø 4.0



EbonyGold винт
: GSABSM

Высота десны	1.5		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSFAM4015	GSFAM4015N	GSFAM4030	GSFAM4030N

D Ø 4.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота десны	1.5		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSFA4015	GSFA4015N	GSFA4030	GSFA4030N

D Ø 5.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота десны	1.5		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSFAS5015	GSFAS5015N	GSFAS5030	GSFAS5030N

D Ø 5.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота десны	1.5		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSFA5015	GSFA5015N	GSFA5030	GSFA5030N

D Ø 6.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота десны	1.5		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSFA6015	GSFA6015N	GSFA6030	GSFA6030N

D Ø 7.0



EbonyGold винт
: GSABSS

Высота десны	1.5		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSFA7015	GSFA7015N	GSFA7030	GSFA7030N


NP-Cast абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементной фиксацией
- Используется для изготовления индивидуального абатмента
- После изготовления убедитесь в том, что при отливке протеза используется только сплав драгоценных металлов для зубных протезов
- Точка плавления абатмента: 1400- 1550° C
- Снепок с уровня имплантата
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендованный момент вращения при вкручивании 20 Нем (Мини), 30 Нем (Стандарт)
- Упаковка : абатмент + EbonyGold винт

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: GSNA4510S**WH**)

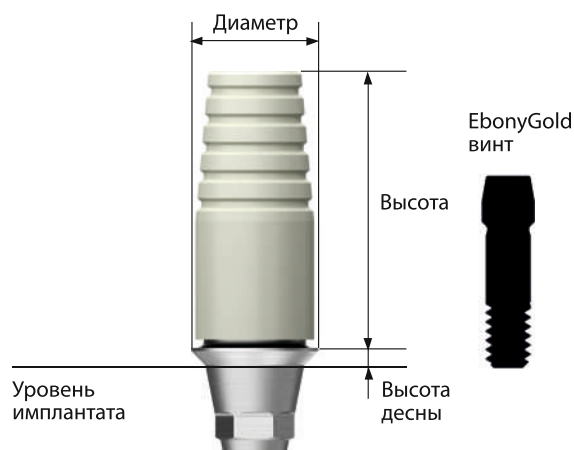

СИСТЕМА TS

046

D Ø 4.0



EbonyGold винт

: GSABSM

Высота десны	1.0		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSNA4010S	GSNA4010B	GSNA4030S	GSNA4030B

D Ø 4.5




EbonyGold винт

: GSABSS

Высота десны	1.0		3.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSNA4510S	GSNA4510B	GSNA4530S	GSNA4530B

Multi / Multi Angled

Слепок на уровне абатмента

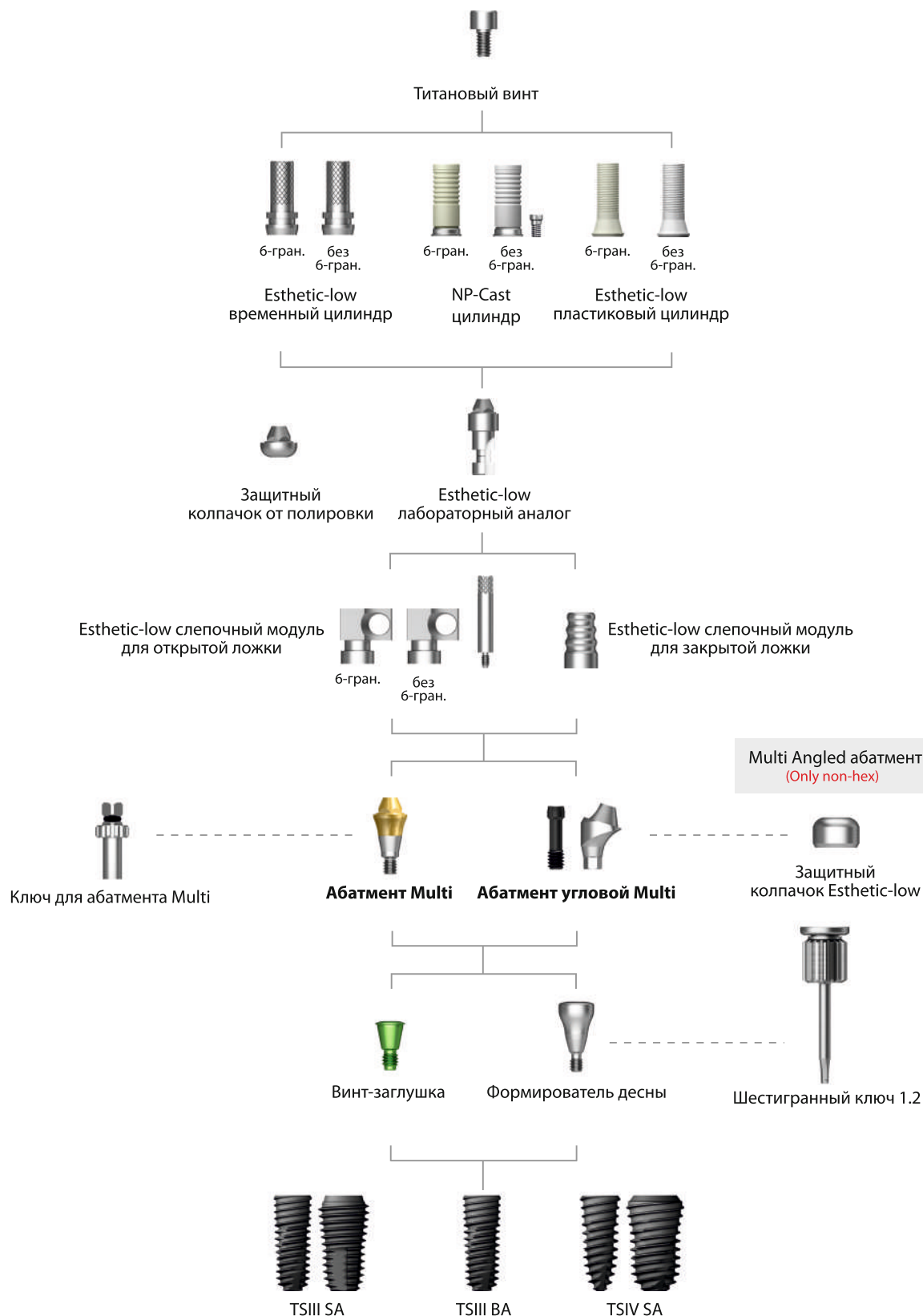


Multi абатмент

- Используется при винтовой фиксации
- Слепок с уровня абатмента
- Использовать для конструкции с винтовым типом соединения в случае одновременной установки нескольких имплантатов
- Использовать при плохой пассивной посадке протезной конструкции
- С абатментом Multi возможно компенсировать направление до 24° (48° на 2 имплантата)
- Компенсирует до 60° с цилиндром Esthetic-low
- Устанавливается с помощью ключа для абатмента Multi (MADO)
- Рекомендуемый момент вращения при выкручивании: 20 Нсм для Мини и 30 Нсм для Стандарта

Абатмент + carrier (держатель)

Код заказа: код изделия + **P**
(например: TSMA5030**P**)

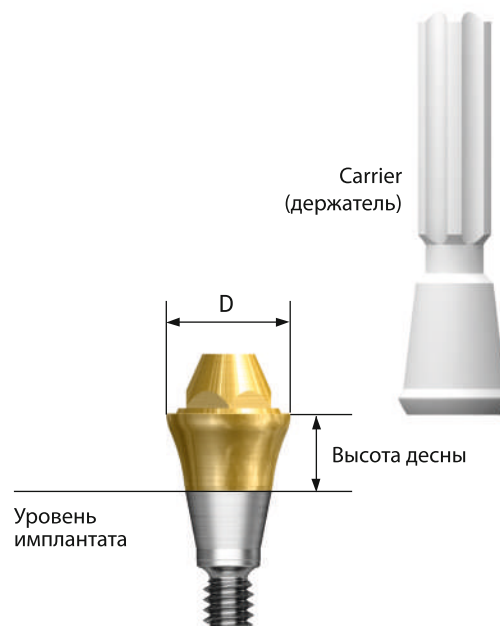

СИСТЕМА TS

048

D Ø 4.8



Высота десны

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0



TSMA5010M



TSMA5020M



TSMA5030M



TSMA5040M



TSMA5050M

D Ø 4.8



Высота десны

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0



TSMA5010



TSMA5020



TSMA5030



TSMA5040



TSMA5050

Multi абатмент

Компоненты

Ключ для Multi абатмента

- Используется для изготовления протезов на Multi абатментах с ручной фиксацией



MAOD

Ключ для Multi абатмента - машинный ввод

- Используется для изготовления протезов на Multi абатментах с машинной фиксацией



MAMD

СИСТЕМА TS

049

Multi абатмент NP-Cast цилиндр

- Используется для изготовления протезов на Multi абатментах с винтовой фиксацией
- Рекомендуемый момент вращения при выкручивании: 20 Нсм
- Температура плавления: 1400-1550°C
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Комплектация: Абатмент и титановый винт Multi

Диаметр

Тип

6-гран.

без 6-гран.



TSMN500



TSMN500N



Абатмент + Ti Screw

Код заказа: код изделия + **ТН**
(например: TSMN500**ТН**)



Стандарт

Multi Abutment

Компоненты

Multi комбинированный цилиндр

- Используется для изготовления протезов на Multi абатментах
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Комплектация: Абатмент и титановый винт Multi

Abutment + Ti Screw

Код заказа: код изделия + **ТН**
(например: TSMC500**ТН**)



Стандарт

Диаметр \ Тип	6-гран.	без 6-гран.
		
	TSMC500	TSMC500N

Esthetic-low защитный колпачок

- Защитный колпачок
- Используется 1,2 ключ



Мини



Стандарт

Диаметр \ Высота	6.0
	
ø4.8 / ø4.8	MHC R100

Esthetic-low пластиковый цилиндр

- Протез с винтовой фиксацией
- Отливка сплава из недорогого материала
- Используйте 1.2 ключ
- Рекомендуемый торк : 20Нсм
- В упаковка: цилиндр + титановый винт цилиндра

Цилиндр + титановый винт


Код заказа: код товара + **ТН**
(например: MEPR200**ТН**)



Мини



Стандарт

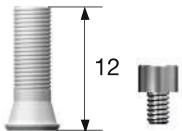Диаметр \ Тип	6-гран.	без 6-гран.
		
	MEPR200	MEPR100
ø4.8 / ø4.8		12
Ti screw		
: MTS200 (ø4.8 / ø4.8)		

Multi Abutment

Компоненты

Esthetic-low Pick-up слепочный модуль


- Компоненты для снятие слепка на уровне имплантата
- Pick up слепочный модуль для esthetic-low абатмент
- Используйте 1.2 ключ
- В упаковке :слепочный трансфер+ направляющий пин (*)



Мини



Стандарт

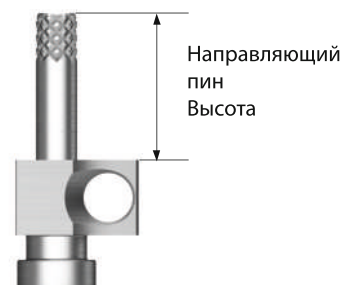

Диаметр \ Высота				Направляющий пин			
		6-гран.	без 6-гран.	5	10	12	15
Ø4.8 / Ø4.8							
		MSR200	MSR100	GP100	GP150*	GP170	GP200

Esthetic-low Transfer слепочный модуль

- Transfer слепочный модуль для esthetic-low абатмента
- Используйте 1.2 ключ



Мини



Стандарт

Диаметр \ Высота	8.0
Ø4.8 / Ø4.8	 MTTR100

Esthetic-low лабораторный аналог

- Лабораторный аналог для esthetic-low абатмента
- Используйте 1.2 ключ



Мини



Стандарт

Диаметр \ Высота	
Ø4.8 / Ø4.8	 MERR300

Esthetic-low протектор для полировки

- Защищает соединения GoldCast/пластиковых цилиндров в процессе полировки
- Используйте 1.2 ключ



Мини



Стандарт

Диаметр

Высота


ø4.8 / ø4.8



MPCR100

Multi угловой абатмент

- Используется для регулировки направления протеза при винтовой фиксации
- Возможный угол регулировки направления до 60° (по сравнению со стандартным)
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм для Мини и 30 Нсм для Стандарт

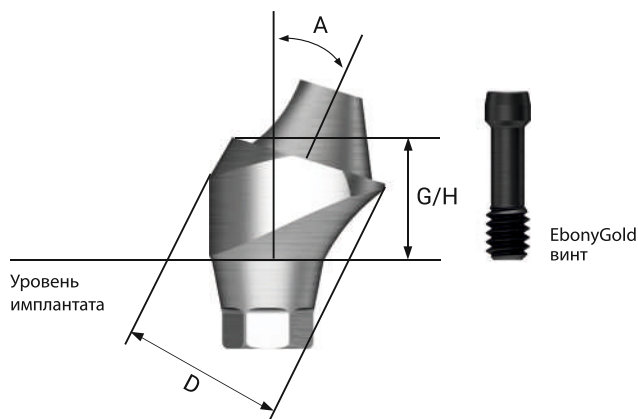

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**
(например: GS17MAS4840**WH**)

СИСТЕМА TS

054

D Ø 4.8



EbonyGold винт
: GSMABSM

Угол	Высота десны	2.5	3.0	4.0
17°				
		GS17MAM4820	GS17MAM4830	GS17MAM4840

Угол	Высота десны	3.5	4.0	5.0
30°				
		GS30MAM4830	GS30MAM4840	GS30MAM4850

D Ø 4.8




EbonyGold винт
: GSMABSS

Угол	Высота десны	2.5	3.0	4.0
17°				
		GS17MAS4820	GS17MAS4830	GS17MAS4840

Угол	Высота десны	3.5	4.0	5.0
30°				
		GS30MAS4830	GS30MAS4840	GS30MAS

Convertible

Слепок с уровня абатмента

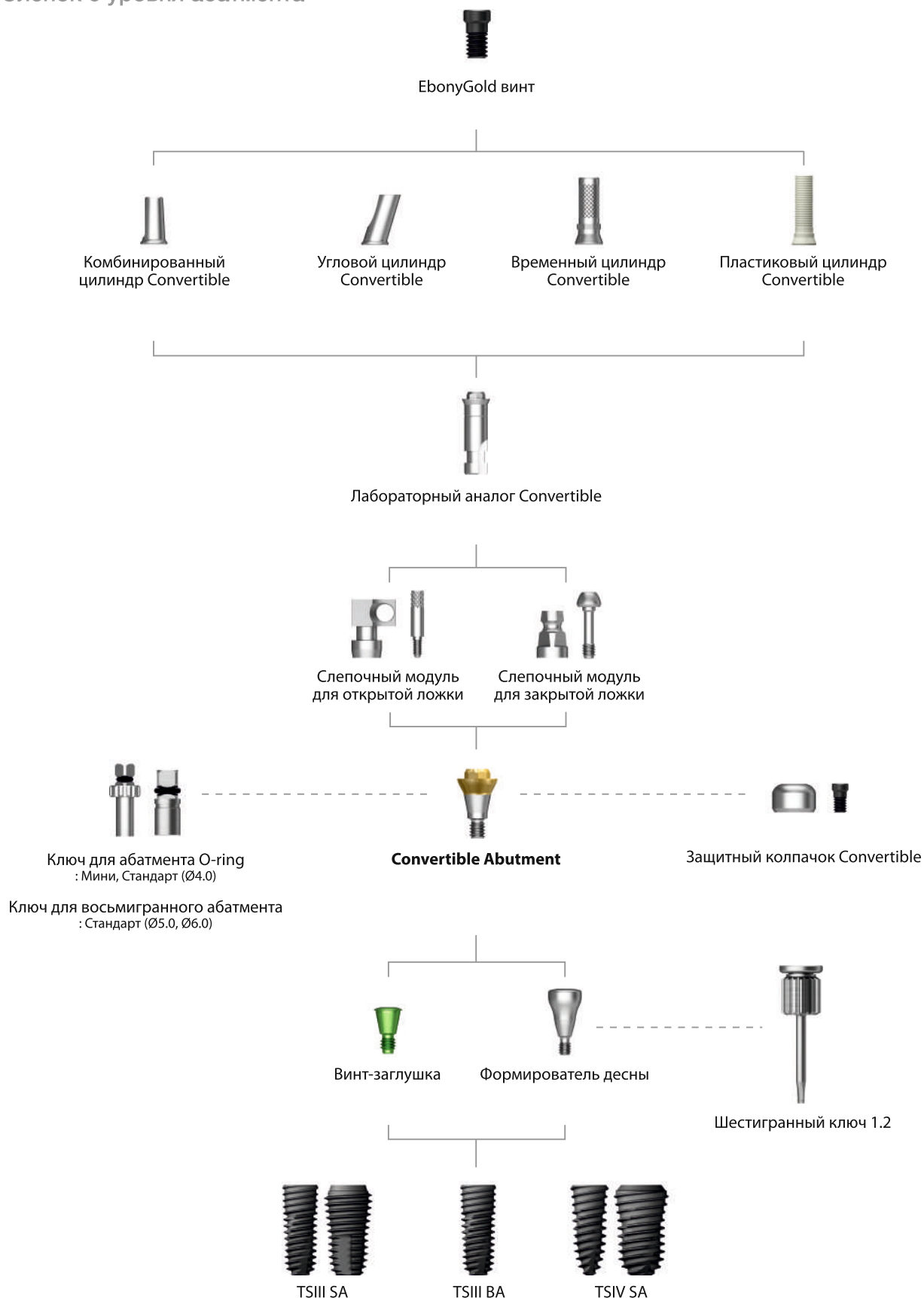

Convertible абатмент

- Используется для изготовления мостовидного протеза на модулях с учетом направления фиксации абатмента в полости рта
- Использовать для конструкции с винтовым типом соединения в случае одновременной установки нескольких имплантатов
- Использовать при плохой пассивной посадке протезной конструкции
- Компенсация наклона (направления) до 60° (на двух имплантатах)
- Для Ø4.0 (Мини) используется ключ для абатментов O-ring
- Для абатментов Стандарт используется ключ для восьмигранного абатмента
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 30 Нсм
- Комплектация: абатмент и держатель

Абатмент + carrier (держатель)

Код заказа: код изделия + **P**
(например: GSCA5030**P**)



СИСТЕМА TS

056

D Ø 4.0



Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					-
	GSCA 4010	GSCA 4020	GSCA 4030	GSCA 4040	-

D Ø 4.0



Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					-
	GSCAS 4010	GSCAS 4020	GSCAS 4030	GSCAS 4040	-

D Ø 5.0



Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
	GSCA 5010	GSCA 5020	GSCA 5030	GSCA 5040	GSCA 5050

D Ø 6.0



Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
	GSCA 6010	GSCA 6020	GSCA 6030	GSCA 6040	GSCA 6050

Convertible абатмент

Компоненты

Комбинированный цилиндр Convertible

- Используется при комбинированном протезировании с использованием абатмента Convertible
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Комплектация: цилиндр + винт EbonyGold
- Рекомендуемый момент вращения при выкручивании: 20 Нсм

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: GSCC5070T**WH**)



Мини



Стандарт

Диаметр \ Высота	Тип	7.0		
		6-гран.	без 6-гран.	8-гран.
Ø4.0 / Ø4.0		 GSCC4070T	 GSCC4070TN	-
Ø5.0		-	-	GSCC5070T
Ø6.0		-	-	GSCC6070T

EbonyGold screw
: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)
: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)

Диаметр \ Высота	Тип	8.0		
		6-гран.	без 6-гран.	8-гран.
Ø4.0 / Ø4.0		 GSAC4080T	 GSAC4080TN	-
Ø5.0		-	-	GSAC5080T
Ø6.0		-	-	GSAC6080T

EbonyGold screw
: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)
: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)



Мини



Стандарт

Угловой цилиндр Convertible

- Используется при комбинированном протезировании с использованием абатмента Convertible
- При необходимости регулировки направления нагрузки на протез с углом отклонения от вертикальной оси до 17°
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: GSAC5080T**WH**)

Временный цилиндр Convertible

- Используется при временном протезировании (материал Ti Gr-3)
- Специальный дизайн позволяет минимизировать противопоказания к использованию
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм

Абатмент + Ti винт

Код заказа: код изделия + **ТН**
(например: GSCTC500**ТН**)

М Мини **С** Стандарт

Диаметр	Высота Тип	12		
		6-гран.	без 6-гран.	8-гран.
Ø4.0 / Ø4.0 Ø5.0 Ø6.0				
		GSCTC 400T	GSCTC 400TN	-
		-	-	GSCTC 500T GSCTC 600T
EbonyGold screw : GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0) : GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)				

Пластиковый цилиндр Convertible

- Используется при изготовлении протезов с винтовой фиксацией
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**
(например: GSCPL500**WH**)

М Мини **С** Стандарт

Диаметр	Высота Тип	12		
		6-гран.	без 6-гран.	8-гран.
Ø4.0 / Ø4.0 Ø5.0 Ø6.0				
		GSCPL 400	GSCPL 400N	-
		-	-	GSCPL 500 GSCPL 600
EbonyGold screw : GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0) : GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)				

СИСТЕМА TS

059

Цилиндр GoldCast Convertible

- Цилиндр GoldCast: Сплав золота и платины (Au-Pt) + полиоксометалат (POM)
- Используется при комбинированном протезировании с использованием абатмента Convertible
- После изготовления убедитесь в том, что при отливке протеза используется только золотой сплав для зубных протезов
- Температура плавления абатмента 1400-1500°C (запрещается использование сплавов не драгоценных металлов для отливки)
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм

М Мини **С** Стандарт



Диаметр	Высота Тип	12		
		6-гран.	без 6-гран.	8-гран.
Ø4.0 / Ø4.0 Ø5.0 Ø6.0				
		GSGC 400	GSGC 400N	-
		-	-	GSGC 500 GSGC 600
EbonyGold screw : GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0) : GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)				

Convertible абатмент

Компоненты

Слепочный модуль Convertible для открытой ложки

- Конструкция для снятия слепка с использованием индивидуальной оттисковой ложки
- Слепочный модуль типа «отверстие в отверстие», который не требует фиксации смолой
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Асимметричная структура, снижающая воздействие внешних факторов
- Комплектация: тело слепочного модуля и направляющий штифт

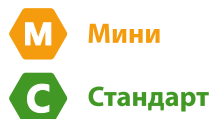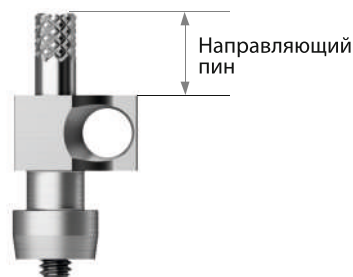

Диаметр \ Высота десны

Направляющий пин
0 5.0



Ø4.0 / Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0

GSPIC400 (Hex / Yellow)
GSPIC500 (Octa / Silver)
GSPIC600 (Octa / Blue)

-
]




GSCGP 400S
GSCGP 500S



GSCGP 400L*
GSCGP 500L*

Слепочный модуль Convertible для закрытой ложки

- Закрытая конструкция для снятия слепка с использованием стандартной готовой ложки
- Треугольная арочная конструкция улучшает маркировочную способность после снятия слепка
- Используется шестигранный ключ 1.2

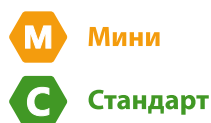

Диаметр



Ø4.0 / Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0

GSTIC400 (Hex / Yellow)
GSTIC500 (Octa / Silver)
GSTIC600 (Octa / Blue)

Защитный колпачок Convertible

- Защищает абатмент Convertible в полости рта и используется для минимизации дискомфорта пациента
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм
- Используется шестигранный ключ 1.2

Абатмент + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**
(например: GSCHC500**WH**)



Мини



Стандарт

Диаметр

Ø4.0 / Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

EbonyGold screw
: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)
: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)

GSCHC400 (Hex)

GSCHC500 (Non-Octa)

GSCHC600 (Non-Octa)

Лабораторный аналог Convertible

- Используется для изготовления эстетических абатментов с использованием рабочей модели
- Используется шестигранный ключ 1.2



Мини



Стандарт

Диаметр

Ø4.0 / Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0

GSCLA400 (Hex)

GSCLA500 (Octa)

GSCLA600 (Octa)

Защитный колпачок от полировки Convertible

- Используется во время полировки после отливки протеза, чтобы избежать повреждения цилиндра в точке соединения
- Используется шестигранный ключ 1.2



Мини



Стандарт

Диаметр

Ø4.0 / Ø4.0

Ø5.0

Ø6.0


GSCPC400 (Hex)

GSCPC500 (Octa)

GSCPC600 (Octa)

Stud / Port

Слепок с уровня абатмента

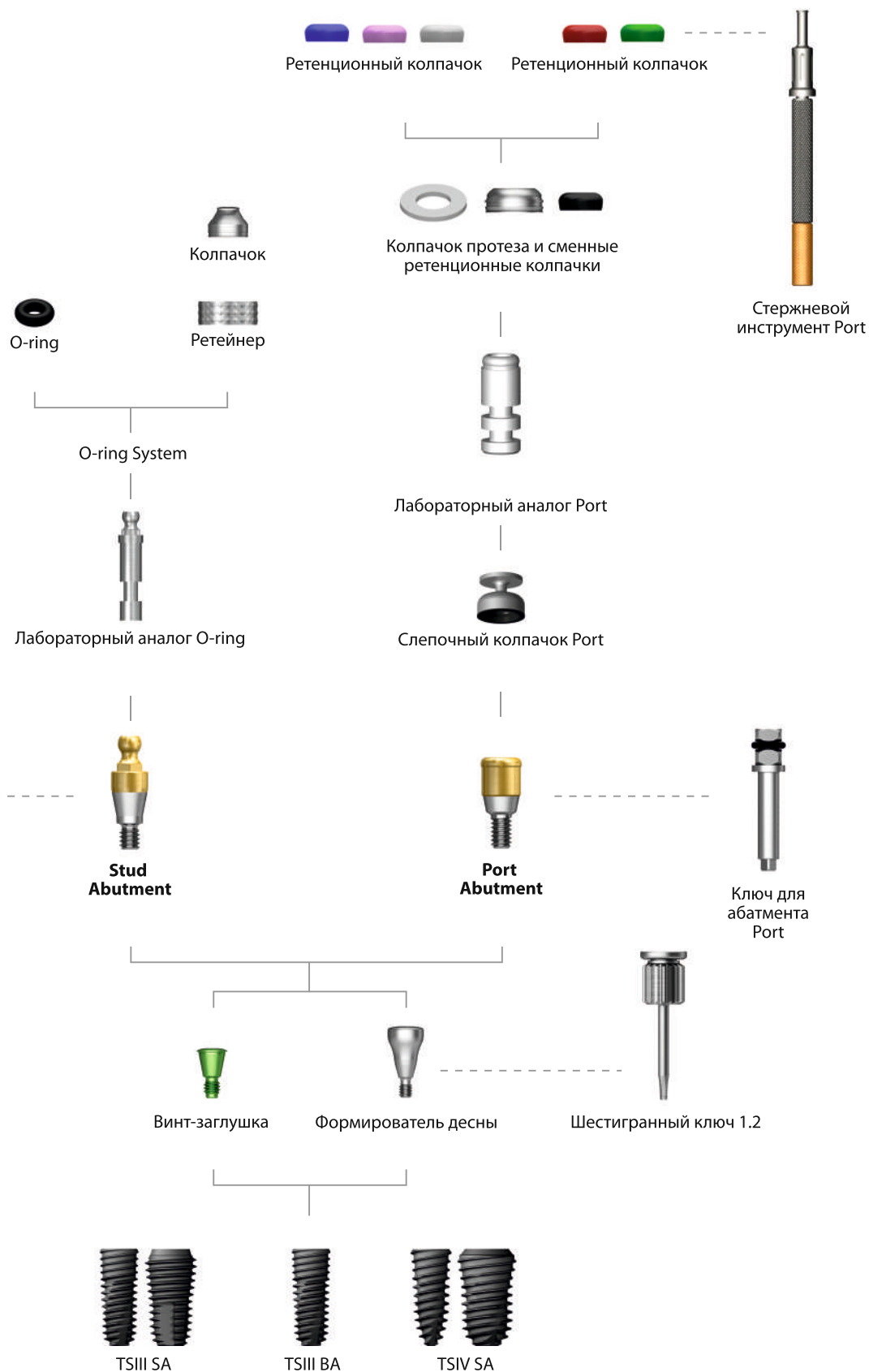

Stud абатмент

- Показания к применению: съемные протезы на штифтах
- Максимальная компенсация пути введения 20°
- Используются комплекты ретенционных колпачков O-ring
- Сила ретенции кольцевого уплотнителя O-ring 4Н/6Н
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 30 Нсм
- Размер шара:
 - малый размер – диаметр 1,7 мм, высота 2,5 мм;
 - стандартный размер – диаметр 2,25 мм, высота 3,4 мм



D Ø 3.5

M

Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Малый размер	GSST3510M	GSST3520M	GSST3530M	GSST3540M	GSST3550M	GSST3560M
Стандартный размер	GSSAM3510	GSSAM3520	GSSAM3530	GSSAM3540	GSSAM3550	GSSAM3560

D Ø 3.5

C

Высота десны	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Малый размер	GSST3510R	GSST3520R	GSST3530R	GSST3540R	GSST3550R	GSST3560R
Стандартный размер	GSSA 3510	GSSA 3520	GSSA 3530	GSSA 3540	GSSA 3550	GSSA 3560

Комплект ретенционных колпачков O-ring

- Комплектация: ретенционный колпачок O-ring и кольцо O-ring



RCS01



RCS02
(Small size)

Наборы ретейнеров O-ring

- Лучше подходят для работы с меньшим окклюзионным промежутком, чем ретенционный колпачок
- Комплектация: ретейнер O-ring и кольцо O-ring



RS01

Набор колец O-ring

- Комплектация: набор колец O-ring (5 шт)



OA0N01S

Лабораторный аналог O-ring

- Воспроизводит абатмент O-ring на рабочей модели



OAL

Port абатмент

Компоненты

D Ø 3.7

M

Диаметр x G/H	Код
Ø3.7 x 1.0mm	TSPTA3510M
Ø3.7 x 2.0mm	TSPTA3520M
Ø3.7 x 3.0mm	TSPTA3530M
Ø3.7 x 4.0mm	TSPTA3540M
Ø3.7 x 5.0mm	TSPTA3550M
Ø3.7 x 6.0mm	TSPTA3560M
Ø3.7 x 7.0mm	TSPTA3570M



D Ø 3.7

C

Диаметр x G/H	Код
Ø3.7 x 1.0mm	TSPTA4010R
Ø3.7 x 2.0mm	TSPTA4020R
Ø3.7 x 3.0mm	TSPTA4030R
Ø3.7 x 4.0mm	TSPTA4040R
Ø3.7 x 5.0mm	TSPTA4050R
Ø3.7 x 6.0mm	TSPTA4060R
Ø3.7 x 7.0mm	TSPTA4070R



Слепочный модуль Port (1ea)

- Для передачи полного соответствия положения имплантата в полости рта на модель
- Комплектация: 4 слепочных модуля Port



PTCICB



PTCIC

Лабораторный аналог Port (1ea)

- Комплектация: лабораторный аналог Port 4 шт



PTCLA40



PTCLA50

Комплект колпачков Port

- Компоненты:
 - Изолирующее кольцо
 - Колпачок протеза
 - Сменные колпачки: синий/розовый/прозрачный
- Замена колпачка производится с помощью стержневого инструмента Port
- Комплектация: набор ретенционных колпачков для абатментов Port (2 набора)



PTCMK



PTCMC

Комплект ретенционных колпачков Port

- Ретенционная сила: 3 Н
- Угол расхождения между осями двух имплантатов 0° - 20°
- Комплектация: запасные колпачки 4 шт
- Ретенционная сила: 6 Н
- Угол расхождения между осями двух имплантатов 0° - 20°
- Комплектация: запасные колпачки 4 шт
- Ретенционная сила: 12 Н
- Угол расхождения между осями двух имплантатов 0° - 20°
- Комплектация: запасные колпачки 4 шт
- Ретенционная сила: 22 Н
- Угол расхождения между осями двух имплантатов 0° - 20°
- Комплектация: запасные колпачки 4 шт



PTCM04S



PTCM06S



PTCM12S



PTCM22S

Port абатмент

Компоненты

Комплект расширенных ретенционных колпачков Port

- Ретенционная сила: 6 Н
- Угол расхождения между осями двух имплантатов 20° - 40°
- Комплектация: расширенный ретенционный колпачок красного цвета (4 шт)
- Ретенционная сила: 12 Н
- Угол расхождения между осями двух имплантатов 20° - 40°
- Комплектация: расширенный ретенционный колпачок зелёного цвета (4 шт)



Комплект чёрных ретенционных колпачков Port

- Предназначен для работы над изготовлением протеза в лаборатории
- Комплектация: запасные колпачки 4 шт



Комплект изолирующих колец Port

- Для изолирования пространства между абатментом Port и колпачком протеза
- Комплектация: изолирующие кольца Port 20 шт



Комплект клопачков Port



Стержневой инструмент Port

- Используется для установки и удаления ретенционных колпачков Port



Ключ для абатмента Port

- Ключ используется для фиксации абатмента Port

Тип


Короткий

Длинный



Угловой Port абатмент Компоненты

- Показания к применению: условно-съемные протезные конструкции на имплантатах в области верхней и/или нижней челюсти
- Возможность коррекции расхождения между осями имплантатов до 60° (два имплантата со стандартной ортопедической платформой)
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм для Мини и 30 Нсм для Стандарт

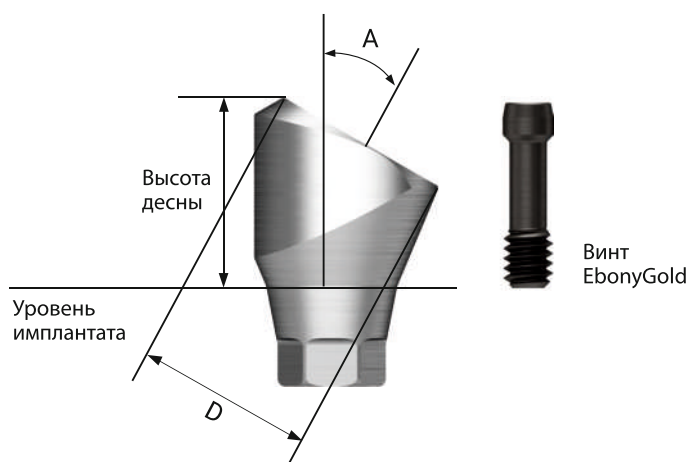

СИСТЕМА TS

068

D Ø 4.6



Ti винт
: GSMABSM

Угол 10°	Высота десны	4.0	5.0
		 TS10PA454M	 TS10PA455M
Угол 17°	Высота десны	4.0	5.0
		 TS17PA454M	 TS17PA455M
Угол 30°	Высота десны	4.0	5.0
		 TS30PA454M	 TS30PA455M

D Ø 4.6



Ti винт
: GSMABSS

Угол 10°	Высота десны	4.0	5.0
		 TS10PA454R	 TS10PA455R

Угол 17°	Высота десны	4.0	5.0
		 TS17PA454R	 TS17PA455R

Угол 30°	Высота десны	4.0	5.0
		 TS30PA454R	 TS30PA455R

Головка углового абатмента Port


- Головная часть для присоединения к Угловому абатменту Port
- Используется при помощи ключа для абатмента Locator
- Рекомендуемый момент вращения: 20 Нсм
- Упаковочная единица: головка Абатмента + носитель



PTA450P

Link / ZioCera / ZioCera Angled / Quick Temporary

Слепок с уровня имплантата

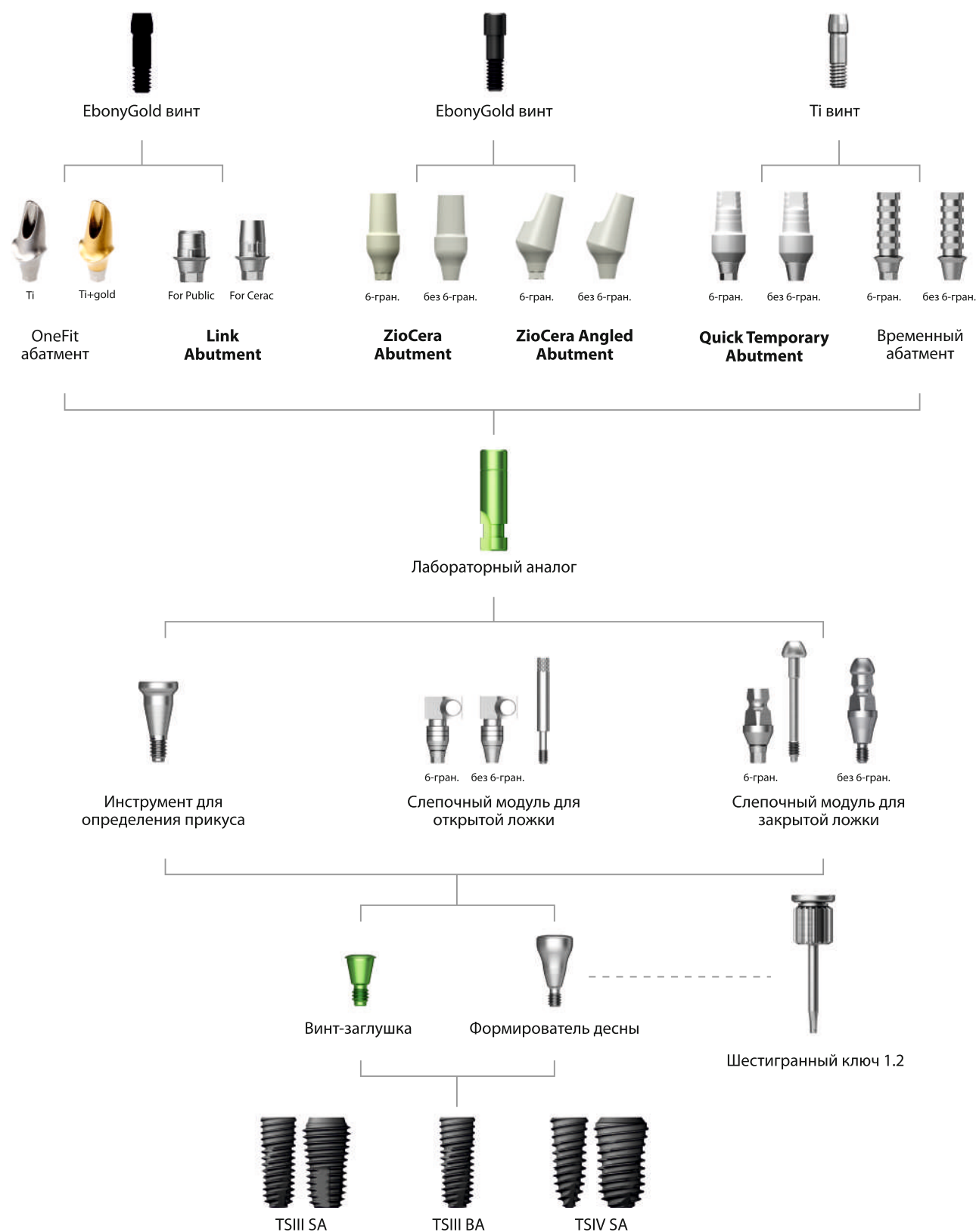


Link абатмент for Public

- Изготовление индивидуальных абатментов по системе CAD/CAM
- Возможность изготовления циркониевых коронок на титановом основании
- Используется для разных фрезерных станков (кроме Cerec - Sirona)
- Официальная библиотека в 3Shape и ExoCAD

Абатмент + EbonyGold винт + scan body

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: TSPTB431R**WH**)

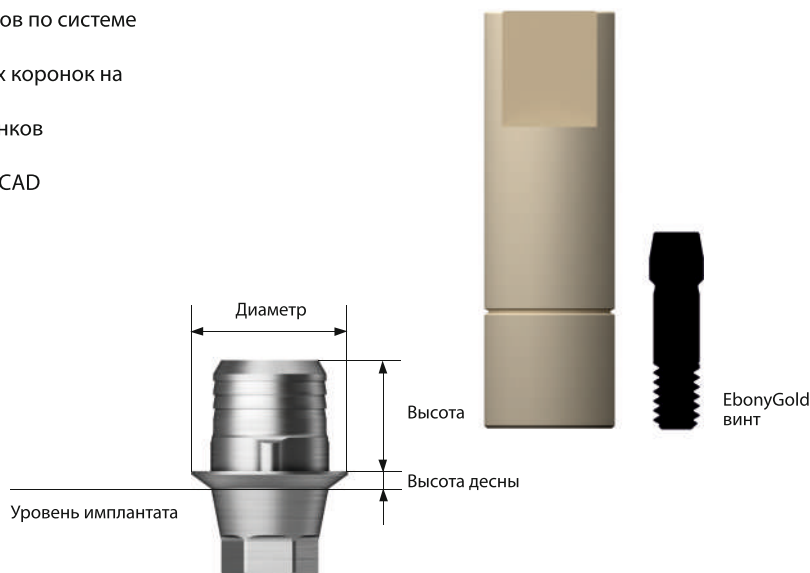

D Ø 4.0



EbonyGold винт
: GSABSM

		Тип	Высота десны	1.0	2.0
6-гран.	3.0				
	5.0			TSPTB451M	TSPTB452M
без 6-гран.	3.0			TSPTB431MN	TSPTB432MN
	5.0			TSPTB451MN	TSPTB452MN

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSS

		Тип	Высота десны	1.0	2.0
6-гран.	3.0				
	5.0			TSPTB451R	TSPTB452R
без 6-гран.	3.0			TSPTB431RN	TSPTB432RN
	5.0			TSPTB451RN	TSPTB452RN


Link абатмент for Cerec

- Возможность изготовления индивидуального абатмента под любой клинический случай с использованием системы CAD/CAM
- Используется циркониевый блок Sirona Incoris Zi Meso block
- Полностью совместим со сканирующим, фрезерным и дизайн-оборудованием CEREC
- Возможность изготовления циркониевых коронок на титановом основании

Abutment + EbonyGold винт + scan body

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: TSCTBR**WH**)

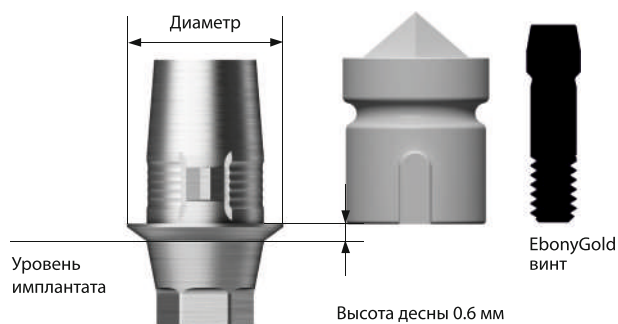

СИСТЕМА TS

072

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSM

Тип

6-гран.



TSCT**BM**

без 6-гран.



TSCT**BMN**

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSS

Тип

6-гран.



TSCT**BR**

без 6-гран.



TSCT**BRN**

Модуль для сканирования Scan Post

- Используется в случае возникновения трудностей при сканировании ротовой полости (затруднения при обнаружении титанового основания во время сканирования ввиду глубокой посадки Scan Body).
- Применение - удалить титановое основание из имплантата и зафиксировать на модуле для сканирования Scan Post. Затем Scan Body крепится на Scan Post и производится сканирование.
- Scan Post увеличивает высоту Scan Body и делает его видимым для сканирующего устройства.

Abutment + Screw

Код заказа: код изделия
(например: **TSCSPR**)



Мини



Стандарт



Винт желтого цвета
: GSABSMIL



TSCSPM



Винт зеленого цвета
: GSABSSL



TSCSPR

Модуль для сканирования Scan Body

- Scan Body для сканирования Link абатментов для Cerec
- Упаковка: Scan Body 10 шт.



TSCSBS

ZioCera абатмент

- Цвет циркония улучшает эстетический эффект
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Комплектация: абатмент и винт EbonyGold
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм для Мини и 30 Нсм для Стандарта

Abutment + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**
(например: GSZAS5535N**WH**)



СИСТЕМА TS

074

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSASM

Высота десны	3.5		5.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSZAM4535	GSZAM4535N	GSZAM4550	GSZAM4550N

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSASR

Высота десны	3.5		5.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	GSZAS4535	GSZAS4535N	GSZAS4550	GSZAS4550N

D Ø 5.5



EbonyGold винт
: GSASR

Тип	Высота десны 3.5		5.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
				
	GSZAS5535	GSZAS5535N	GSZAS5550	GSZAS5550N

D Ø 6.5



EbonyGold винт
: GSASR

Тип	Высота десны 3.5		5.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
				
	GSZAS6535	GSZAS6535N	GSZAS6550	GSZAS6550N


Угловой ZioCera абатмент

- Используется для эстетической реставрации, когда необходимо изменение направления
- Цвет циркония улучшает эстетический эффект
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании 0 Нсм (Стандарт)
- Угол наклона 17°

Abutment + EbonyGold винт

Код заказа: код изделия + **WH**

(например: GS17ZAS5530**WH**)

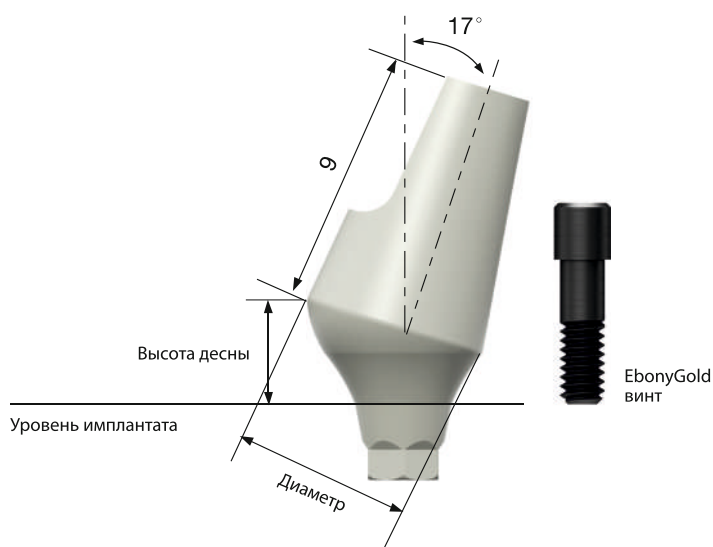

СИСТЕМА TS

076

D Ø 5.5



EbonyGold винт

: GSASR

Высота десны
Тип

6-гран.

3.0

без 6-гран.



GS17ZAS5530

GS17ZAS5530N

D Ø 6.5



EbonyGold винт

: GSASR

Высота десны
Тип

6-гран.

4.0

без 6-гран.




GS17ZAS6540

GS17ZAS6540N

Quick Temporary

Слепок с уровня Имплантата

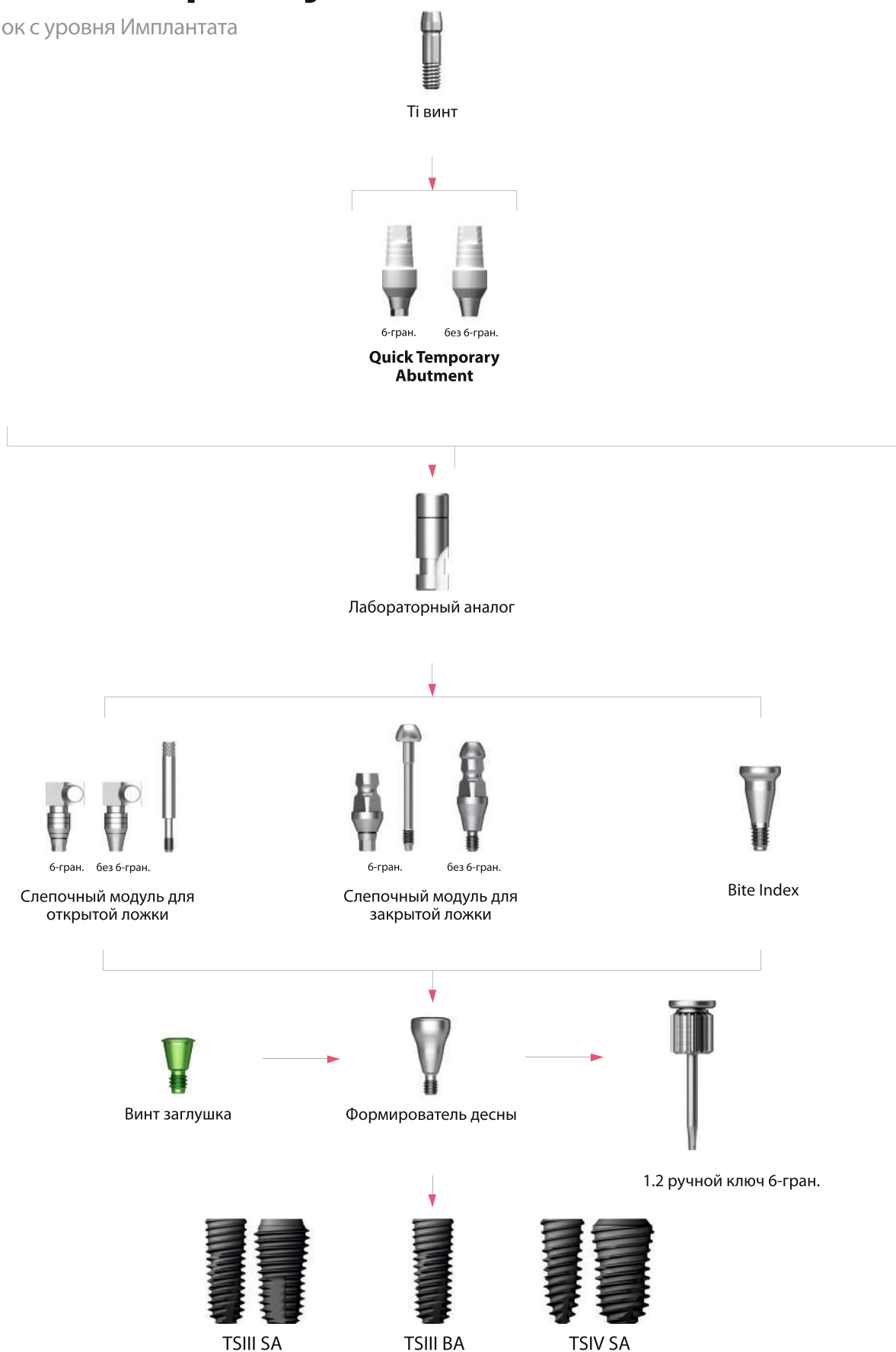


Quick Temporary абатмент

- Применяется при общем протезировании с цементно-винтовой фиксацией
- Используется при изготовлении временного протеза для немедленной нагрузки
- Обтачивается и взаимодействует с композитом
- РЕЕК обеспечивает быструю модификацию/извлечение конструкции
- Отличная прочность благодаря титановой платформе
- Может находиться в полости рта до 180 дней
- Используется шестигранный ключ 1.2
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании 20 Нсм (Мини/ Стандарт)
- Упаковка : абатмент + Ti винт ~

Abutment + Ti винт

Код заказа: код изделия + **ТН**
(например: TSQTA5550**ТН**)

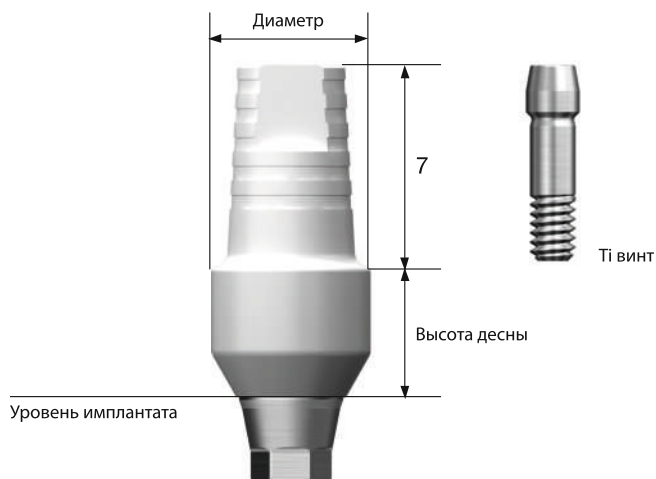

СИСТЕМА TS

078

D Ø 4.0



Ti винт
: GSABSMT

Высота десны	1.5		5.0	
Тип	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
				
	TSQTA4015M	TSQTA4015MN	TSQTA4050M	TSQTA4050MN

D Ø 4.5



Ti винт
: GSABSMT

Высота десны	1.5		5.0	
Тип	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
				
			TSQTA4550	TSQTA4550N

D Ø 4.5



EbonyGold винт
: GSABSST

Высота десны	1.5		5.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип				
	TSQTA4515R	TSQTA4515RN	TSQTA4550R	TSQTA4550RN

D Ø 5.5



Ti винт
: GSABSST

Высота десны	1.5		5.0	
	6-гран.	без 6-гран.	6-гран.	без 6-гран.
Тип	-	-		
	-	-	TSQTA5550	TSQTA5550N

Pre-Milled абатмент

- Титановая заготовка для изготовления индивидуальных абатментов с помощью CAD/CAM систем
- Используется для изготовления индивидуального абатмента из титана на фрезерном оборудовании Arum или Zikkonzahn

Scan body + винт

Код заказа: код изделия + **WH** или **TH**
(например: TSPM1 **OARMWH**)



Диаметр



EbonyGold
винт

Модуль для сканирования Scan Body

- Scan Body для изготовления титанового индивидуального абатмента
- Для Model Scan: длинный (15 мм)
- Для внутре-орального сканера scan: короткий (10 мм)
- Рекомендуется использовать ключ 1.2
- В упаковке: Scan Body + титановый винт



Винт желтого цвета
: TSSBSM

Высота

10.0

15.0



TSSBOM



TSSBM

Высота

10.0

15.0



Винт зеленого цвета
: TSSBS



TSSBOS



TSSBS




Мини





Стандарт



TS Pre-Milled Abutment

- Это индивидуальный абатмент с учетом формы окончательного протеза на основе полости рта пациента с использованием системы CAD / CAM. Верхняя часть абатмента имеет цилиндрическую форму для того, чтобы приспособить и обрабатывать этот абатмент в соответствии с полостью рта пациента


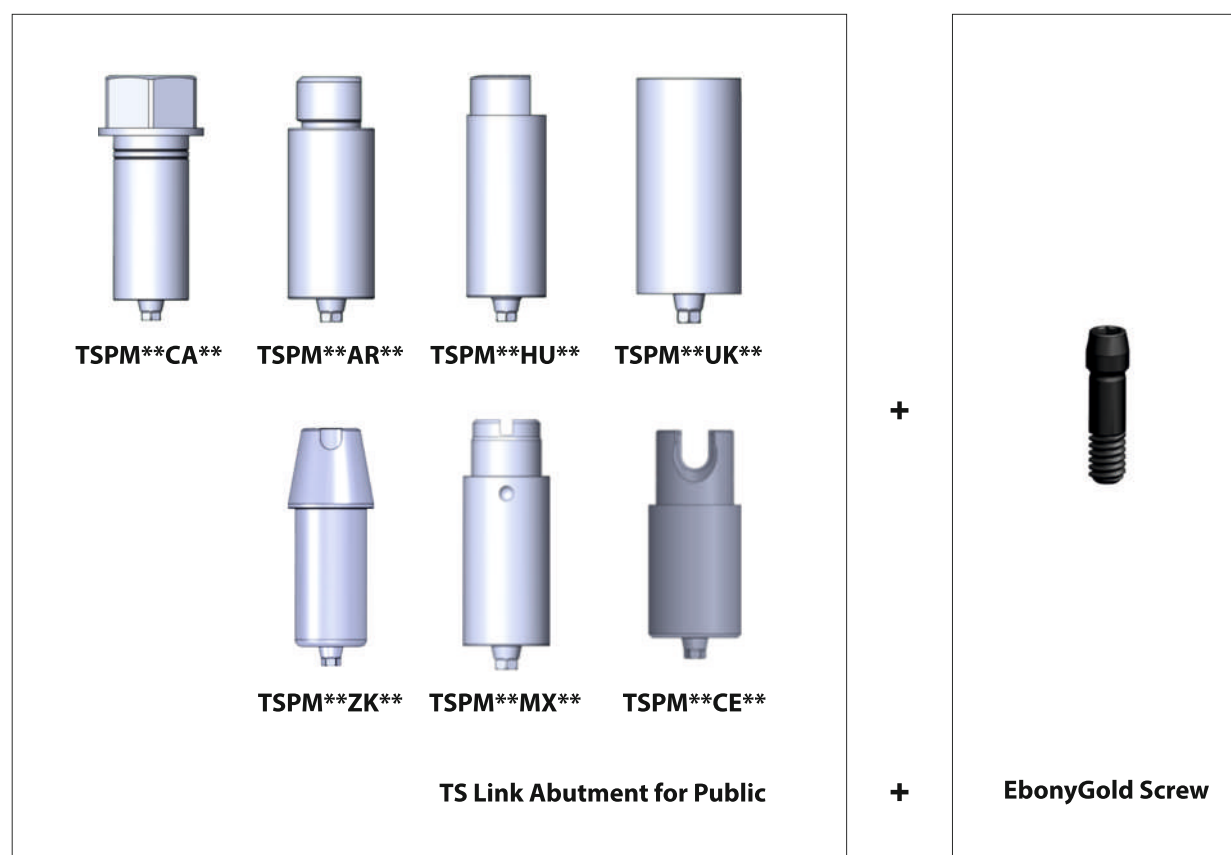




TS Pre-Milled абатмент

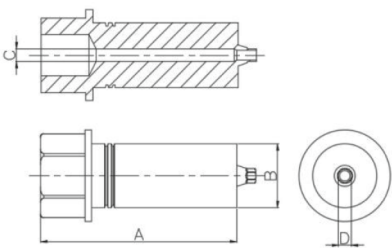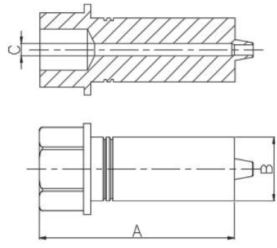					
		6-гран.		без 6-гран.	
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM10CAM	30.0	10.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM10CAMN	30.0	10.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM10CAR	30.0	10.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM10CARN	30.0	10.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM07CAM	30.0	7.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM07CAMN	30.0	7.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM07CAR	30.0	7.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM07CARN	30.0	7.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM14CAM	30.0	14.0	2.30 x	2.08	Мини/6-гран.
TSPM14CAMN	30.0	14.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM14CAR	30.0	14.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM14CARN	30.0	14.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.

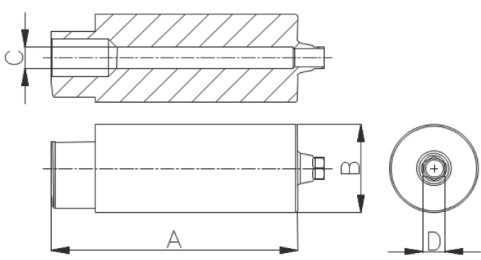
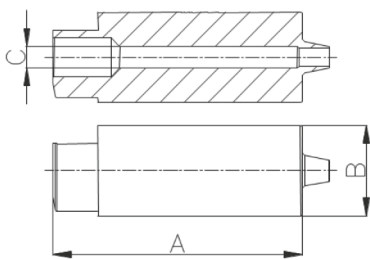
					
		6-гран.		без 6-гран.	
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM10HUM	27.7	10.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM10HUMN	27.7	10.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM10HUR	27.7	10.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM10HURN	27.7	10.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.



TS Pre-Milled абатмент

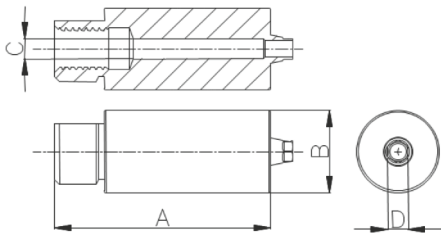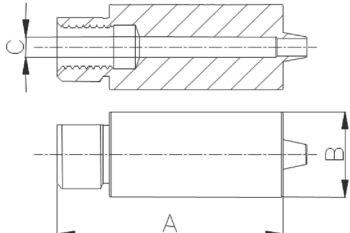		 6-гран.			 без 6-гран.
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM07ARM	26.0	7.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM07ARMN	26.0	7.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM07ARR	26.0	7.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM07ARRN	26.0	7.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM10ARM	26.0	10.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM10ARMN	26.0	10.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM10ARR	26.0	10.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM10ARRN	26.0	10.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM14ARM	26.0	14.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM14ARMN	26.0	14.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM14ARR	26.0	14.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM14ARRN	26.0	14.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.

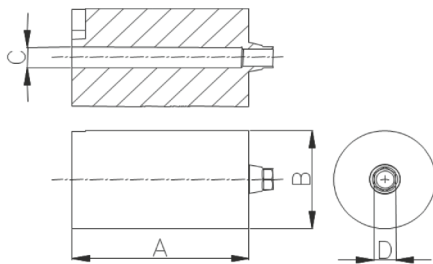
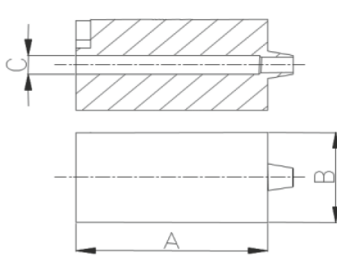
		 6-гран.			 без 6-гран.
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM10UKM	20.0	11.5	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM10UKMN	20.0	11.5	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM10UKR	20.0	11.5	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM10UKRN	20.0	11.5	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.

TS Pre-Milled абатмент

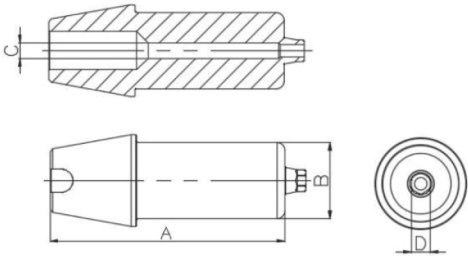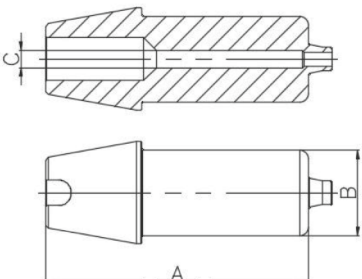		 6-гран.			 без 6-гран.
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM07ZKM	30.9	7.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM07ZKMN	30.9	7.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM07ZKR	30.9	7.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM07ZKRN	30.9	7.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM10ZKM	30.9	10.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM10ZKMN	30.9	10.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM10ZKR	30.9	10.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM10ZKRN	30.9	10.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM14ZKM	30.9	14.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM14ZKMN	30.9	14.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM14ZKR	30.9	14.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM14ZKRN	30.9	14.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.

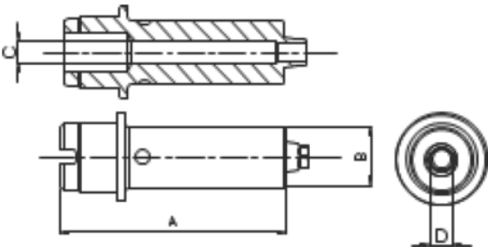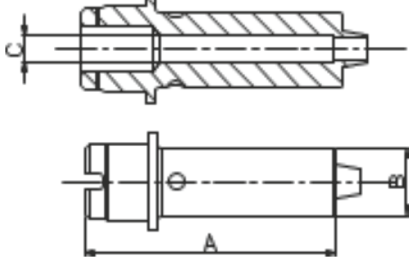	 6-гран.				 без 6-гран.
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM07MXM	26.0	7.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM07MXMN	26.0	7.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM07MXR	26.0	7.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM07MXRN	26.0	7.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM10MXM	26.0	10.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM10MXMN	26.0	10.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM10MXR	26.0	10.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM10MXRN	26.0	10.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.
TSPM14MXM	26.0	14.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM14MXMN	26.0	14.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM14MXR	26.0	14.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM14MXRN	26.0	14.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.

TS Pre-Milled абатмент

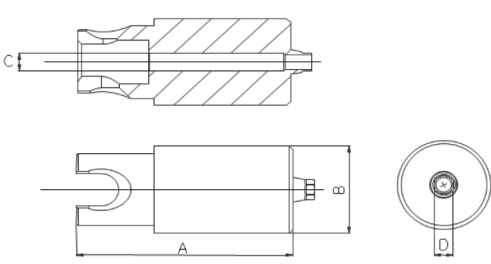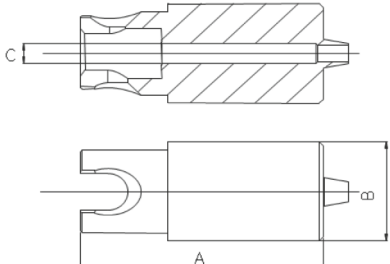  6-гран.  без 6-гран.					
Code	A(Ø)(mm) (±0.02)	B(mm) (+0, -0.1)	C(mm) (+0.05, -0.02)	D(mm) (±0.005)	Remark
TSPM12CEM	27.7	12.0	2.30	2.08	Мини/6-гран.
TSPM12CEMN	27.7	12.0	2.30	-	Мини/без 6-гран.
TSPM12CER	27.7	12.0	2.40	2.48	Стандарт/6-гран.
TSPM12CERN	27.7	12.0	2.40	-	Стандарт/без 6-гран.